

MICRONEW SVĚTLEM TUHNOUCÍ ZESÍLENÉ MIKROFILNÍ KOMPOZITUM

Obecné informace

Micronew je světlem tuhnoucí, vysoce zesílené, mikrofilní kompozitum. Díky svému zesílenému složení lze Micronew použít pro většinu tříd kavit. Micronew má také, díky svým submikronovým plnicím částicím, vynikající leštiteľnost – použitelnost pro anteriorní opravy. Plnivo dává Micronew pro svůj vysoký obsah (69 – 72% váhy) jedinečné fyzické vlastnosti – sílu a odolnost. Doporučuje se používat s adhezivy 4. a 5. třídy, např. All-Bond 2 nebo One-Step

HLAVNÍ POLE PŮSOBNOSTI MICRONEW

- kavity 3. – 5. třídy
- uzávěry diastémy
- přímé nanášení
- kompozitní a porcelánové opravy
- periodontické dlahování
- ve „sendvičové“ technice vrchní vrstva na Renew či Aelite LS, kde je třeba maximální síla a leštiteľnost

Micronew je k dispozici v bílém, incisálním a odpovídajícím VITA průsvitném a opákním odstínu. Je vytvořeno speciálně, aby splňovalo široké spektrum estetických požadavků, a to jak při samotném, tak při „sendvičovém“ použití společně s Renew nebo Aelite LS. Opákní bílé odstíny, W1, W2 a W3 (bílé 1, 2,3) jsou vhodné pro pacienty, jež prošli bělením zubů. W1 odstín je nejsvětější mezi těmito 3 velmi světlými odstíny. Incisální odstíny zahrnují modrý, čistý, světle šedý, středně šedý a mrazivý. Používají se jako náhrada enamelu oprav. Tělově průsvitné odstíny zahrnují A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 a jsou určeny jako náhrada dentinu, kompozitujících tělo opravy. OW (opákní bílé) a tělově opákní odstíny A1.5 a B0 (světější než B1) se používají přestavbu lingvální stěny kavit 4. třídy. Také je lze použít pro překrytí skvrn na zubní struktuře, aby došlo ke zvýšení hodnoty definitivní opravy a jejímu zesvětlení.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před desikací si vyberte bílý, incisální průsvitný či opákní odstín.
2. Izolujte zub a připravte si kavitu zaběhnutým způsobem. Vyčistěte celý povrch pemprou a desinfikujte vodou či např. Cavity Cleanser.
3. Leptejte leptadlem – např. Etch-37, Uni-Etch nebo Tyrian SPE dle instrukcí výrobce.
4. Aplikujte adhezivum, jako je All-bond 2, One-Step nebo One-Step Plus dle instrukcí výrobce.
5. Naneste potřebné množství dříve vybraného odstínu Micronew kompozitu na stíněnou podložku otáčením pístu ve směru pohybu hodinových ručiček. Abyste zamezili úniku přebytečného materiálu ze stříkačky, otočte pístem o otáčku zpět. Používáte-li Micronew v unidózách, naneste kompozitum přímo do místa určení.
6. Naneste 1 – 2 mm vrstvu kompozita do kavity. Každou vrstvu polymerujte světlem 20 vteřin. Tímto způsobem nanášejte kompozitum dokud není kavita naplněna až po okraj. Finální vrstvu polymerujte světlem 30 vteřin.
7. Zkontrolujte okluzi a opravu dokončete zaběhnutým způsobem. Poté co je oprava vyleštěna, aplikujte Fortify nebo Fortify Plus povrchové pečtidlo (není součástí balení) dle instrukcí výrobce, abyste zvýšili okrajovou integritu a zamezili otěru a oxidaci.

BALENÍ

Micronew Complete Kit

H-75000K

8 stříkaček Micronew. Odstíny průsvitný A1, A2, A3.5, B1, opákní B0, incisální mrazivý, světle šedý a středně šedý (2.5 g každý), 2 stříkačky Fortify Plus (1.5g každá), 25 jehlových kartáčkových špiček, 1 lahvička 32% Uni-Etch s BAC (7g), návod k použití.

Micronew Introductory

H-75010K

5 stříkaček Micronew. Odstíny průsvitný A2, A3.5, B1, incisální mrazivý a světle šedý (2.5 g každý), návod k použití.

Micronew Systém Kit

H-75020K

5 stříkaček Micronew. Odstíny průsvitný A2, A3.5, B1, incisální mrazivý a světle šedý (2.5 g každý), 1 lahvička One-Step (4ml) 1 stříkačka 32% Uni-Etch s BAC (7g), 1 stříkačka Fortify Plus (1.5g), 10 jehlových kartáčkových špiček, 15 jednoúčelových jehlových špiček, příslušenství, návod k použití.

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před přímým slunečním světlem a vysokými teplotami (více jak 30°C). Skladujte při pokojové teplotě (cca 22°C). Produkt je určen pouze pro stomatology!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte zasažení očí. V případě zasažení očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření. V případě kontaktu s pokožkou omyjte mýdlem a vodou. Při požití vypijte 2 sklenice vody či mléka a vyhledejte lékaře.

ZÁRUKA

Společnost Bisco se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost Bisco nepřijímá odpovědnost za poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Před prvním použitím je důležité si podrobně přečíst návod. V případě nejasností kontaktujte dodavatele.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz