

METAL PRIMER II

prostředek pro vazbu pryskyřic ke kovům

METAL PRIMER II obsahuje speciální monomer (MEPS thiofosforečný metakrylát) , který zprostředkuje vazbu akrylových pryskyřic a kompozit ke všem druhům kovů.

Doporučené použití:

Vazba akrylových a kompozitních pryskyřic ke všem typům kovů podle návodu k použití.

Poznámky a kontraindikace:

1. Pro použití pouze stomatology a zubními techniky v doporučených indikacích.
2. Obsahuje metakrylát. Neměl by být použit personálem nebo pacienty, kteří vykazují alergii na metakrylát. V případech alergické reakce vyhledejte lékařskou pomoc.
3. V případě kontaktu s pokožkou nebo očima okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
4. Hořlavé. Zabraňte styku s vysokou teplotou, s přímým slunečním svitem a zdroji tepla. Používejte v dobře větraných místnostech.
5. Těkávé. Uzavřete lahvičku okamžitě po použití.
6. Určete štěteček (č. 7) pro použití **POUZE** s METAL PRIMER II.

Návod k použití:

Obecně ve všech případech

1. Opískujte povrch kovu aluminium oxidovým pískem a očistěte proudem vzduchu.
Poznámka: Zabraňte kontaminaci olejem, separátorem nebo vlhkostí z prstů atd.
2. Aplikujte 2-3 kapky METAL PRIMER II do místičky nebo podobné nádoby. Za použití štětce aplikujte na vazný povrch tenkou vrstvou. Nechte vyschnout.
Poznámka: Druhá vrstva může být aplikována, jestliže je to nutné.
3. Aplikujte pryskyřici na kov jak je popsáno níže.
Poznámka: Pryskyřici aplikujte na kov okamžitě poté, kdy je povrch připraven.

Doporučené aplikace:

1. Pryskyřičný cement ke kovu na kovové inleje, korunky a můstky.
 - a) Připravte povrch kovu, jak je popsáno výše a připevněte práci pryskyřičným cementem.
2. Opaquer pryskyřice na kov pro zhotovení kompozitních fazet a korunek.
 - a) Připravte povrch jak je popsáno výše a aplikujte opaquer (GC THERMORESIN LC II) běžným způsobem. Vytvrďte podle doporučení výrobce.
3. Baze pryskyřičné náhrady k magnetickým attachmentům.
 - a) Připravte povrch jak je popsáno výše a připevněte attachment běžným způsobem za použití samotuhnoucí akrylové pryskyřice (GC UNIFAST).

4. Bazální pryskyřice k kovové desce, sponě nebo attachmentu.
 - a) Připravte vazný povrch opískováním aluminium oxidem a očistěte proudem vzduchu.
 - b) Zhotovte náhradu z vosku.
 - c) Po vyplavení vosku očistěte vazný povrch za použití vyvíječky páry. Odstraňte vosk dokonale při použití rozpouštědla.
 - d) Aplikujte METALPRIMER II.
 - e) Kondenzujte a vytvrděte bazální pryskyřici běžným způsobem.
5. Oprava poškozené korunky nebo fazety můstku v ústech.
 - a) Umístěte kofferdam.
 - b) Vyčistěte povrch kovu tvrdokovovým kartáčkem a pokračujte jak je popsáno výše.
6. Oprava náhrady s kovovou deskou, sponou nebo attachmentem.
 - a) Zhruběte povrch kovu karborundovou špičkou.
 - b) Připravte vazný povrch jak je popsáno výše.
 - c) Vytvořte ze samotuhnoucí pryskyřice doplněk náhrady běžným způsobem.
7. Vazba pryskyřice ke kovovým ortodontickým pomůckám.
 - a) Připravte vazný povrch jak je popsáno výše.
 - b) Aplikujte ortodontickou pryskyřici na pomůcku běžným způsobem.

Balení:

1 lahvička (5ml) METAL PRIMER II
1 štěteček (č. 7)

Skladování:

Skladujte v chladném místě (4-25°C) mimo dosah přímého slunce.
Trvanlivost 2 roky od data výroby.

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-7, fax: 577 926 205, www.hufa.cz, hufa@hufa.cz