



1. Připravte kořenový kanálek tradiční metodou s pomocí endokanálkových nástrojů.
2. Vypláchněte kanálek.
3. Připravte si kanálek speciálním kalibrovaným předvrtávačem.
4. Vypláchněte kanálek.
5. Vysušte kanálek papírovými čepy.
6. Namíchejte adhesivum a aplikujte do kořenového kanálku.
7. Polymerujte adhesivum 20 vteřin.
8. Očistěte povrch čepu alkoholem.
9. Vysušte povrch vzduchem.
10. Aplikujte adhesivum na čep.
11. Polymerujte adhesivum 20 vteřin.
12. Aplikujte cement do kořenového kanálku.
13. Vložte čep do kořenového kanálku.
14. Ponechejte čep ve své pozici a zkontrolujte zatvrdnutí cementu.