

## MIRATRAY IMPLANT

### otiskovací lžice na implantáty s fóliovou technikou

#### NÁVOD K POUŽITÍ


Nápad pro vytvoření nové transparentní otiskovací lžice pro implantology je založen na skutečnosti, že tato transparentní lžice umožňuje bezpečně označit pozici konstrukce. Miratray Implant může být po označení provrtán a bezpečně a přesně umístění lžice je pro implantology hračkou. Miratray implant byl vyvinut speciálně pro otisky na poli implantologie a má vynikající stabilitu, konstrukci a transparentnost. Miratray Implant přichází jako úvodní balení pro bezzubé a ozubené případy, pro horní a dolní lžici. Náhradní balení dle velikosti je možno objednat samostatně.

#### MATERIÁL

Miratray Implant je vyroben z Plexiglas plastu, FDA certifikovaného materiálu. Miratray Implant odolává maximálním teplotám 98°C a proto je nevhodný pro autokláv. Abyste zamezili možné infekci, lžice po použití zlikvidujte.

#### VÝBĚR LŽÍCE – ZUBATÝ PŘÍPAD

Správnou lžici určíte změřením v ústech. Kovové nožky měřítka se dotýkají M2 a P2 (obr. 1). V případě výběru horní lžice je toto vestibulární a při spodní lžici lingvální. Měřítka poté umístíte na měřicí šablonu. Jakmile kovové měřicí nožky kompletně zakryjí černě označená místa, pak je velikost lžice správně identifikována. Velikost/číslo lžice poté ihned zaznamenejte do pacientovy karty. Vložte lžici do úst. Jasně zkontrolujte prostor mezi otiskovací lžicí a zubem moudrosti.

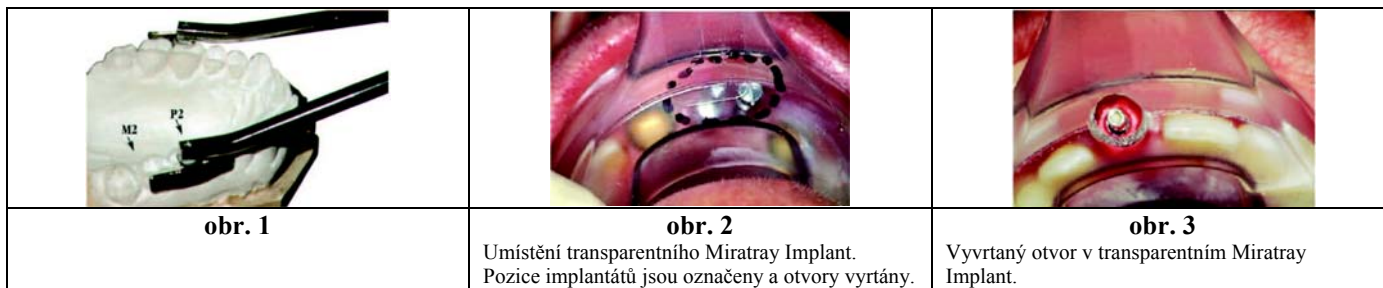

#### VÝBĚR LŽÍCE – BEZZUBÝ PŘÍPAD

##### Spodní oblouk

Měřítkem změřte intraorálně vzdálenost mezi retromolárními ploškami. Poté umístíte měřítka na měřicí šablonu a určete velikost/číslo lžice.

##### Horní oblouk

Měřítkem změřte největší vzdálenost mezi bukálním povrchem alveolární brázdy. Poté umístíte měřítka na měřicí šablonu a určete velikost/číslo lžice.



#### PŘÍPRAVA MIRATRAY IMPLANT PRO OTISKY

Po umístění Miratray Implant označte pozici pilířů na transparentním povrchu popisovačem. Poté vyvrtejte otvory přímo v pozicích pro implantologické čepy.

#### OTISKOVAČÍ TECHNIKA

Pro finální otisk doporučujeme použít silikon nebo polyether s vysokou finální tvrdostí. Vždy používejte adhesivum. Během tvrdnutí otiskovacího materiálu doporučujeme podepřít implantologické čepy paralelně ke lžici.

**DESINFEKCE OTISKU Z DŮVODU ZAMEZENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU LUXACE**

Otisk by měl být desinfikován dle instrukcí výrobce otiskovacího materiálu.

číslo	produkt	druh případu	obsah
101 220	sada Miratray Implant	zubatý případ	1 x horní lžice vel. 42, 43, 44 a 45 1 x spodní lžice vel. 52, 53, 54 a 55 1 x měřítko, 1 x velikostní tabulka, 1 x návod k použití
101 221	sada Miratray Implant	zubatý případ	1 x spodní lžice vel. 22, 23, 24 a 25 1 x horní lžice vel. 32, 33, 34 a 35 1 x měřítko, 1 x velikostní tabulka, 1 x návod k použití
101 222	4x v náhradním balení	zubatý případ	4 x horní lžice, velikost 42
101 223	4x v náhradním balení	zubatý případ	4 x horní lžice, velikost 43
101 224	4x v náhradním balení	zubatý případ	4 x horní lžice, velikost 44
101 225	4x v náhradním balení	zubatý případ	4 x horní lžice, velikost 45
101 226	4x v náhradním balení	zubatý případ	4 x spodní lžice, velikost 52
101 227	4x v náhradním balení	zubatý případ	4 x spodní lžice, velikost 53
101 228	4x v náhradním balení	zubatý případ	4 x spodní lžice, velikost 54
101 229	4x v náhradním balení	zubatý případ	4 x spodní lžice, velikost 55
101 230	4x v náhradním balení	bezzubý případ	4 x spodní lžice, velikost 22
101 231	4x v náhradním balení	bezzubý případ	4 x spodní lžice, velikost 23
101 232	4x v náhradním balení	bezzubý případ	4 x spodní lžice, velikost 24
101 233	4x v náhradním balení	bezzubý případ	4 x spodní lžice, velikost 25
101 234	4x v náhradním balení	bezzubý případ	4 x horní lžice, velikost 32
101 235	4x v náhradním balení	bezzubý případ	4 x horní lžice, velikost 33
101 236	4x v náhradním balení	bezzubý případ	4 x horní lžice, velikost 34
101 237	4x v náhradním balení	bezzubý případ	4 x horní lžice, velikost 35

**AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:**

Hu-Fa Dental, Moravská 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)