

MODELING RESIN SVĚTLEM TUHNOUCÍ MODELOVACÍ PRYSKYŘICE

OBECNÉ INFORMACE

Modeling Resin je světlem polymerující, nízkoviskózní mikrofilní (30% váhy) pryskyřičný preparát, který se používá jako tvarovací kompozitní pryskyřice. Tento preparát vzniknul, aby se zabránilo působení přirozených vlastností kompozit – samovolné přilnavosti k nástroji. Tím je usnadněno umístění a modelování kompozit. Stačí pouze navlhčit nástroj a již můžete nerušeně pracovat na všech přímých kompozitních opravách.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. odšroubujte víčko a na stříkačku nasadte špičku. Vytláče jednu nebo dvě kapky Modeling Resinu do čisté míchací misky nebo na míchací podložku.
2. Kompozitní nástroj namočte do Modeling Resin a nyní již můžete nerušeně pokračovat v nanášení vrstev kompozita a jeho tvarování do požadované podoby.
3. Polymerujte světlem. Ačkoliv Modeling Resin vyžaduje 10ti vteřinovou polymeraci, dbejte instrukcí daných výrobcem kompozita, aby bylo zaručeno dokonalé vytvrzení kompozitní vrstvy. Další vrstvy kompozita přilnou ke zpolymerovanému Modeling Resinu.

BALENÍ

2 stříkačky Modeling Resin (1.5g každá), 20 ks černých jednorázových špiček, návod k použití G-9316P

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při pokojové teplotě (22°C).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nezpracovaný rezin může u některých osob způsobit podráždění pokožky. V případě kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem.

ZÁRUKA

Společnost Bisco se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost Bisco nepřejímá odpovědnost za poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Před prvním použitím je důležité si podrobně přečíst návod. V případě nejasností kontaktujte dodavatele.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz