

MODIWAX/LUKAWAX

Popis produktu

MODIWAX/LUKAWAX je světlem tuhnoucí kapničkovací vosk pro výrobu voskových kapniček u korunkových a můstkových technik, pro sekundární korunky, pro spojovací můstky a konturování CrCo slitin (spon a retencí).

Složení

Stearyl akrylát, pigmenty, fotoiniciátory a syntetický polyolefin.

Návod k použití

Vyjměte pásky vosku z ochranného sáčku a odlomte potřebnou část. Po odlomení potřebné části vraťte zbylou část do sáčku a uzavřete proti průniku světla. Kapničkovač musí být bez zbytků předchozích vosků, které mohou vážným způsobem ovlivnit vlastnosti MODIWAX/LUKAWAX. Vosk se rozpouští při 78 – 83°C v kapničkovači, který má danou teplotu nastavenou na displeji. Pro konturaci je možno použít sondu.

Před namočením aplikujte na sádrový pahýl tenkou vrstvu standardního vosk/sádra separátoru. Sádrový pahýl je rychle namočen pod okraj preparace a odstraněn pomalu přes jeden z okrajů pahýlu. Stejná procedura je používána pro primární a sekundární teleskopické práce.

Vosková kapnička a sádrový pahýl jsou umístěny do standardní světelné polymerační jednotky se světelným spektrem 350 – 450 nm a polymerovány 2 minuty ve vysoce výkonných jednotkách a 5 minut v nízko výkonných jednotkách.

Kompletní polymerace může být vizuálně zkontrolována, jelikož se změní barva z růžové do žlutě okrové.

Přebytky přes okraj preparace je možno odstranit před nebo po polymeraci pomocí ostrého nástroje nebo elektrickým voskovým nožem.

MODIWAX/LUKAWAX kapničky musejí být vždy připravovány s čistými nástroji, aby se předešlo kontaminaci jemně lepivého povrchu.

Krčkový okraj je možno konturovat krčkovým modelovacím voskem. Vynikajících výsledků je také možno dosáhnout použitím LUKAForm, světlem tuhnoucí konturovací pryskyřice.

Pro odlívání se doporučují fosfátové zatmelovací hmoty.

Upozornění

- MODIWAX/LUKAWAX je určen pouze pro zevní použití.
- Neupotřeбенý vosk je třeba co nejdříve vrátit do ochranného obalu.
- Zpolymerované zbytky MODIWAX/LUKAWAX není možno opětovně rozpustit a použít.
- MODIWAX/LUKAWAX obsahuje pryskyřice a fotoiniciátory. Tyto při kontaktu s pokožkou způsobují podráždění.
- Při práci používejte ochranné rukavice. S MODIWAX/LUKAWAX může pracovat pouze proškolená osoba.
- Zabraňte ukápnutí horkého vosku na pokožku, tento způsobuje popáleniny.
- Zabraňte vniknutí vody do rozpuštěného vosku.
- Před použitím si přečtěte návod k použití a také instrukce pro použití kapničkovače.
- Voskový kapničkovač by měl mít ochranné oranžové sklíčko. Jestliže nemá, pak použijte opákní víčko bránící vniknutí světla.

Skladování

Skladujte při teplotě 0 – 30°C. Zabraňte vystavení slunečním paprskům. Po použití krabičku řádně uzavřete. Nepoužívejte po datu expirace.

Balení

80g proužky v černém ochranném obalu

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz