

NANOSENSITIVE HCA Dental Kit

POPIS

Nanosensitive HCA Dental Kit je určen pro fyzickou okluzi dentinových tubulů v případě ošetření citlivých zubů. Aktivní složka přípravku je NovaMin, skládající se z anorganických částic nacházejících se přirozeně v tvrdých tkáních. (Va, Na, Si). V případě vystavení vodnímu prostředí, NovaMin projde velmi rychlou povrchovou reakcí, umožňující přilnutí k exponovanému dentinu a vzniku fyzické okluzy dentinových tubulů. Během krátkého časového úseku, v podstatě celý NovaMin zreaguje a zformuje hydroxykarbonátový apatit, který je chemicky a strukturálně podobný minerálům živého zubu.

INDIKACE

Nanosensitive HCA Dental Kit je určen pro rychlou úlevu od přecitlivělosti spojené s exponovaným dentinem. Studie dokazují, že Nanosensitive HCA Dental Kit je efektivní při okluzi exponovaných dentinových tubulů, což je uváděno v literatuře ve spojitosti s redukcí přecitlivělosti.

SLOŽENÍ

NovaMin (calcium sodium phosphorus silicate)

KONTRAIKACE

Existuje zde malé riziko, že u některých pacientů se můžete setkat s pálením nebo brněním. V případě výskytu této citlivosti okamžitě vypláchněte a odsajte materiál dostatečným množstvím vody.

UPOZORNĚNÍ

- není potvrzena účinnost a bezproblémovost u dětí a těhotných žen
- **NEPOUŽÍVEJTE** v případě otevření nebo poškození váčku
- pouze pro jednorázové použití, po otevření spotřebujte nebo zlikvidujte
- **NEPOUŽÍVEJTE** po době expirace uvedené na obalu
- skladujte na suchém místě při pokojové teplotě
- zabraňte kontaktu s jazykem a mukozálními tkáněmi – může vést k pocitům pálení nebo brnění

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vyčistěte a vysušte ošetřovaný zub a okolní místo. Povrch zubu by měl být vlhký, ale ne mokrá.
UPOZORNĚNÍ: Abyste zamezili případnému kontaktu s jazykem a mukozálními tkáněmi, doporučuje ošetřovanou oblast izolovat bavlněnými válečky.
2. Otevřete lahvičku NovaMin částic a pomocí pipety přidejte cca 10-15 kapek vody. Pomocí vatové tyčinky vymíchejte směs do uniformní pasty.
UPOZORNĚNÍ: Nemíchejte materiál déle jak 30 vteřin. Po namíchání materiál ihned aplikujte.
3. Použijte vatovou tyčinku pro snadnou a uniformní aplikaci pasty na exponovaný dentin.
4. Po aplikaci ponechejte přípravek na zubu 2 minuty.
5. Mírně opláchněte a odsajte viditelný zbytek materiálu z ošetřované oblasti.
6. Upozorněte pacienta, že by 30 minut po aplikaci neměl nic jíst nebo pít.

BALENÍ

Každý kit obsahuje cca 0.5 ml materiálu pro ošetření několika zubů. Každý kit obsahuje:

- jednorázovou lahvičku NovaMin, 0.5g
- jednorázovou pipetu
- jednorázovou aplikační vatovou tyčinku
- návod k použití