

PANAVIA 21 - NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Vyčistěte důkladně povrch zubu běžným způsobem.
2. Leptejte sklovinu pomocí Panavia Etching Agent V nejprve 30 sek., poté důkladně opláchněte a vysušte a opět leptejte 30 sek., opláchněte a osušte. Při leptání linguální strany prodlužte čas při druhém leptání na 60 sek.
3. Vytlačte 1 kapku Primer A a B, smíchejte po dobu 3-5 sek. a naneste na dentin a sklovinu. **NEOPLACHUJTE!** Primer by měl být ponechán působit po dobu 60 sek.
4. Vytlačte nutné množství cementu a smíchejte po dobu 20-30 sek., dokud nedosáhnete hladkou, uniformní směs.
5. Po smíchání máte 4 min. pracovní čas. Poté během další 1 min. materiál ztuhne.
6. Odstraňte přebytečný cement pomocí štětečku a začněte z proximální strany.
7. Naneste Oxyguard II a ponechte působit 3 min., dokud nedojde k úplnému vytvrzení materiálu.
8. Odstraňte Oxyguard II lehce pomocí vody.

Uchovávejte v ledničce, před aplikací však materiál vytáhněte a nechte přizpůsobit pokojové teplotě.

Trvanlivost materiálu je 18 měsíců od data výroby.