

## Hu-Fa Dental Zlín

ve spolupráci s americkou firmou

**alpha-dent®**

Vám přináší

### ***Světlem polymerující pečetidlo***

#### **NÁVOD NA POUŽITÍ:**

##### **Preparace:**

- Očistěte povrch, který chcete pečetit. Vyleštěte okluzní plochu. Použijte bez fluoridovou a bez olejovou profylaktickou pastu nebo směs pemzy a vody.
- Vypláchněte pořádně s vodou. Isolujte plochu balvněnými válečky. Vysušte každý zub se vzduchem neobsahujícím ani vlhkost ani olej po dobu 15 sekund.
- Aplikujte leptadlo. Naleptejte celou okluzní plochu. Leptejte povrch nejméně po dobu 60 sekund. Promyjte naleptanou plochu po dobu 15 sekund a důkladně vysušte. Pokud nebude povrch po aplikaci opákní, leptejte znovu.

##### **Aplikace:**

- Aplikujte světlem tuhnutí pečetidlo firmy **Alpha-dent** na okluzní povrch a dejte pozor at' Vám při aplikaci nevzniknou bubliny. Dvě kapky pečetidla je dostatečné množství na ošetření povrchu jednoho kvadrantu.
- Vystavte všechny ošetřené plochy zdroji halogenového světla po dobu 30 sekund, ve vzdálenosti 1 až 2 mm od povrchu.
- Poté co se pečetidlo usadí, vysušte povrch bavlněným válečkem. Zkontrolujte tvrdost a retenci.

##### **Opatření a upozornění:**

- Leptadlo obsahuje 37% kyseliny fosforečné. Vyhněte se kontaktu kyseliny s kůží, ústní sliznicí a očima. V případě potřísnění kůže, vypláchněte vodou. V případě kontaktu s očima se obraťte na lékařskou pomoc.
- Uchovávejte materiál při pokojové teplotě.

***POZOR: Kompletní vypláchnutí je důležité. Leptací roztok zanechaný na povrchu zubu bude překážet důkladnému spojení mezi bondem a pečetidlem.***

**Objednávky a dotazy adresujte na firmu**

**Hu-Fa Dental Zlín  
Moravní 909  
765 02 Otrokovice  
tel: 067/7926226-7  
fax: 067/792 62 05**