

Palaseal & Palaclean

Palaseal - světlem tuhnoucí lak pro pečetění náhrad a dočasných korunek a můstků založených na PMMA-pryskyřici.

Palaclean – pro čištění kartáčků.

Pole působnosti

- pečetění náhrad
- pečetění náhrad po vyleštění
- pečetění dočasných korunek a můstků

Palaclean

Pro snímání PMMA-pryskyřičných materiálů z kartáčků. Kartáčky je možno poté použít opětovně.

Materiál

Palaseal je světlem tuhnoucí lak, který dává nové nebo opravené náhradě stálý a hladký povrch. Průsvitný lak nemění barvu náhrady. Hladký povrch předchází podráždění jazyka a mukózní membrány. Změna zabarvení je vyloučena. Je redukováno množství zachyceného jídla a tak je dosaženo vynikajících hygienických podmínek.

Speciální vlastnosti

- vysoká povrchová tvrdost a odolnost proti otěru
- odolnost vůči čistícím činidlům náhrady
- dobrá přilnavost k materiálu náhrady
- hladký povrch

Aplikace

Použití Palaseal je snadné. Osmirkujte protézu a předleštěte pemzou. Nepoužívejte olejové nebo vazelinové čistící roztoky. Osušte povrch bezolejovým zdrojem vzduchu. Aplikujte Palaseal jemným kartáčkem, jednu velmi tenkou vrstvu, pouze jedním směrem. Nános neopakujte. Polymerujte po 20 vteřinách po dobu 90 vteřin v UniXS nebo Dentacolor XS. Leštění není nutné, výsledkem je kompaktní hladký povrch.

Palaclean je určen pro čištění kartáčků. Namočte kartáček do Palaclean na několik minut, opláchněte v čisté vodě a poté vysušte utěrkou.

Upozornění

Polymerujte pouze v Heraflash-, UniXS nebo Dentacolor XS. Náhrada musí být umístěna v teflonové nádobě, aby mohl být dostatečně zpolymerován celý povrch. V případě stínových oblastí (mukolabiální záhyby, interdentalní oblasti), je třeba sekundární polymerace – opět 90 vteřin. Náhradu je nutno umístit tak, aby tyto stínové oblasti byly nyní zpolymerovány.

Palaseal obsahuje metyl metakrylát; je vysoce hořlavý, dráždí dýchací systém a pokožku, riziko poškození zraku v případě zásahu. Skladujte na dobře větraném místě, v dostatečné vzdálenosti od zdroje vznícení. Při práci nekuřte, zabraňte kontaktu s pokožkou a zrakem. V případě zasažení očí tyto okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při práci používejte ochranné pomůcky.

Palaclean je vysoce hořlavý, dráždí zrak, opětovné zasažení pokožky vyvolává vysušení a praskání pokožky. Výpary mohou způsobit nevolnost a ztrátu orientace. Skladujte mimo dosah dětí, mimo zdroje vznícení. Při práci nekuřte, zabraňte kontaktu s pokožkou a zrakem. V případě zasažení očí tyto okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při práci používejte ochranné pomůcky.

Skladování

Składujte při teplotách pod 25°C na tmavém místě. Dbejte na řádné uzavření. Nepoužívejte do době expirace. Składujte mimo dosah dětí.

Balení

Palaseal
2x15ml

Palaclean
45ml