

NÁVOD NA POUŽITÍ

POPIS VÝROBKU

Pulpdent Porcelain Prep Kit obsahuje nezbytný materiál pro ideální přípravu na bondování: porcelánových faset inlejí a frakturovaných porcelánových zubů.

OBSAH BALENÍ:

1 stříkačka 1.2 ml Porcelain Etch gel
1 stříkačka 1.2 ml Kool-Dam
1 stříkačka 1.2 ml Dry-Rite
1 stříkačka 1.2 ml Silane Bond Enhancer
Aplikační špičky
návod na použití

POZOR

Porcelain Etch gel obsahuje 9.6% kyselinu fluorovodíkovou, silnou a agresivní chemikálii, která produkuje dráždivé výpary a musí se s ní zacházet s maximální opatrností. Případný kontakt této látky s kůží, očima nebo chronické inhalace výparů jsou nebezpečné. Je třeba chránit lékaře, asistentku a pacienta. Výrobce tuto látku zakomponoval, zgeloval a zabalil tak, aby minimalizoval nebezpečí této kyseliny, za předpokladu použití dle níže uvedeného návodu.

Pro bezpečné intra-orální použití postupujte přesně podle následujícího návodu.

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že dojde ke kontaktu Porcelain Etch gelu s kůží nebo měkkými tkáněmi, je třeba zasažená místa důkladně opláchnout vodou minimálně po dobu 2 minut při použití účinné savky pro odsávání vody.

POSTUP:

1. Lékař, asistentka i pacient musí mít zajištěnou ochranu očí brýlemi nebo štítem. Lékař a asistentka musí mít také ochranné rukavice.
2. Aplikujte ruberdam pro izolaci operačního pole a pro ochranu měkkých tkání.
3. Na gingivu nebo povrch zubu vyžadující izolaci aplikujte vrstvu Kool-Dam, 1-2mm silnou.
4. Polymerujte 10 vteřin. Polymeraci je možno provádět všemi druhy lamp.
5. Asistentka musí stát připravena vedle křesla a držet koncovku výkonné odsávačky ve vzdálenosti 5-7 cm od porcelánového povrchu, aby odsávala kyselinové výpary.
6. Sundejte krytku stříkačky Porcelain Etch gel a vložte na ni zahnutou aplikační kanylu. Opatrně začněte vytlačet porcelánový leptací gel na podložku a poté tento vzorek okamžitě znehodnoťte. Nezačňte vytlačet do úst pacienta. Z důvodu maximální kontroly netlačte píst palcem. Doporučujeme držte stříkačku mezi palcem a ukazováčkem, zatímco konec pístu Vám bude spočívat v dlani. Poté jemně zatáhněte zpět palec i ukazováček, abyste začali vytlačet. Nikdy na píst netlačte. Použijte novou aplikační kanylu pro každého pacienta.
7. Opatrně naneste porcelánový leptací gel na povrch a nechejte jej působit po dobu 1 minuty, při stálém odsávání výparů. Stříkačku ihned po použití uzavřete.
8. Odsajte leptací gel savkou. Oplachujte ošetřený povrch dostatečným množstvím vody a poté osušte čistým vzduchem bez obsahu oleje a vlhkosti.
9. Použitím červené aplikační koncovky poté naneste na ošetřovaný povrch Dry-Rite. Abyste podpořili rychlejší schnutí, použijte jemný proud čistého, bezolejového vzduchu. Po použití okamžitě uzavřete stříkačku Dry-Rite.
10. Naneste Silane Bond Enhancer pomocí červené koncovky a nechejte jej uschnout. V případě nutnosti můžete použít jemný proud čistého vzduchu. Po použití opět okamžitě uzavřete stříkačku.
11. Pokračujte v opravě nebo cementování porcelánových zubů, inlejí nebo faset použitím Vámi preferovaného adhesivního prostředku a kompozitního materiálu nebo cementu.