

PreVISION CEM

Jednosložkový cement pro dočasnou cementaci

Informace o produktu

PreVISION CEM je okamžitě použitelný, vlhkostí aktivovaný, bez eugenolový cement se silikon-pryskyřičnou bází. Odstín bílý.

Složení

PreVISION CEM je reaktivní silikonová pryskyřice obsahující:

- zinkovou bělobu
- pyrogenický křemen
- plniva/vaziva

Indikace

PreVISION CEM se používá k cementaci dočasných korunek a můstků nebo pro dočasnou fixaci stálých oprav.

Způsob použití

PreVISION CEM je možno použít pouze v dentální praxi!

- materiál je třeba používat při pokojové teplotě
- vyčistěte připravený zub vodní tryskou
- odstraňte jakékoliv přebytečné množství vody, zub nevysušujte
- na míchací podložku naneste pastu z tuby
- na korunku spatulou aplikujte tenkou vrstvu PreVISION CEM
- dočasnou opravu nebo protézu umístěte do úst, na požadované místo, usadte jemným tlakem
- nechejte cement cca 2 minuty zatvrdnout, poté můžete odstranit přebytečný cement

Doporučené časy

- pracovní čas cca 1 min 30 vteřin při pokojové teplotě
 - čas tuhnutí v ústech cca 2 min
- Čas tuhnutí je delší pro silnější vrstvy cementu a kratší pro velmi tenké vrstvy
Extraorální tuhnutí může trvat déle než intraorální vzhledem k tuhnutí při nižší teplotě a vlhkosti
U dočasných oprav je nutno dbát na to, aby pacient 30 min nekousal.

Retence

Retenční efekt záleží mimo jiné také na tloušťce vrstvy cementu.

- Tenká cementová vrstva podporuje větší síly, zatímco tlustá cementová vrstva redukuje retenci.

Upozornění

Aplikujte materiál na suché dočasné opravy. Pahýly by měly být vlhké. Používejte co možná nejtenčí vrstvu materiálu. Není možno nanést více jak 3 - 4 vrstvy najednou, PreVISION CEM tuhne při vystavení vlhkostí a začíná tuhnout, jakmile je vytlačen z tuby. Čas ponechání v ústech by neměl být delší než 6 měsíců.

Neaplikujte na otevřenou pulpu.

Jestliže je zbylý dentin tenký a/nebo pacient je citlivý na bolest, použití vlhkostí tuhoucích materiály, jako je i PreVISION CEM, může způsobit bolest. V těchto případech doporučujeme použít přípravek pro snížení citlivosti, např. Gluma Desensitizer.

Po každém použití dokonale uzavřete tubu. PreVISION CEM tuhne působením vlhkosti, proto je možné, že dojde k zatvrdnutí materiálu okolo místa, kde byl vytlačen. Malou, první část vytlačeného materiálu proto doporučujeme nepoužívat.

Zabraňte kontaktu s očima. V případě zasažení očí tyto vypláchněte tekoucí vodou a vyhledejte lékařské ošetření, je-li nutno.

Skladování

Nepoužívejte po uplynutí expirace. Skladujte při pokojové teplotě 18-25oC.

Balení

Jednotlivé tuby