

PROFORM 12

Porcelánové aditivum

Proform 12 je možno použít ve spojení se všemi známými porcelánovými značkami. Výraznou měrou zlepšuje modelovací vlastnosti porcelánových prášků. Každá vrstva porcelánu je kombinována s další a tak je zamezováno vysušování.

Speciální vlastnosti

Proform 12 ulehčuje aplikaci opákního prášku. Tato směs se stává více viskózní a nemá již tendenci protékat na okrajích korunek či v interdentalních prostorech. Díky tomu vzniká uniformní, jemná směs pro optimální pokrytí.

Proform 12 přidává porcelánovému prášku plastické modelovací vlastnosti. Toto Vám otevírá nové možnosti v nanášení jednotlivých vrstev. Porcelán je možno nanášet podobně jako vosk.

Proform 12 uchovává porcelánový prášek v plastickém stavu po dobu 3 – 4 hodin. Jestliže aplikujete další vrstvu, není původní vrstvu již třeba navlhčovat a i přesto k ní nová vrstva perfektně přilne. Během aplikace je možno jakoukoliv přebytečnou tekutinu vysušit ubrouskem. Doporučujeme pouze malé zahuštění, které však naprosto odpovídá předschnoucím časům.

Návod k míchání

Opákní prášky je možno míchat obvyklým způsobem. Poté přidejte 1 – 2 kapky a opět trošku prášku. Dobře promíchejte. Po aplikaci sušte teplým vzduchem a předsušujte cca 4 minuty před vypálením.

Dentinové a incisální prášky míchejte s destilovanou vodou, přidejte několik kapek Proform (např. 1 kapku na korunku) a dobře promíchejte. Jestliže by měla směs vyschnout, přidejte do ní opět destilovanou vodu.

Pro opravy po druhém či dalším vypálení doporučujeme míchat prášek pouze s Proform, abyste dosáhli optimální elasticity. Tímto způsobem je zaručena bezchybnost okluzálních povrchů.

Pigmenty by měly být také míchány přímo s Proformem.

V závislosti na tloušťce vrstvy aplikovaného porcelánu se mění i předsušovací čas – 5 – 20 minut před vypálením. Vzhledem k vlastnostem materiálu je třeba, aby předsušení probíhalo separátně pod infračervenou lampou.

SKLADOVÁNÍ

Proform má téměř neomezenou životnost. Skladujte na tmavém a suchém místě.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz