

NÁVOD NA POUŽITÍ

SLOŽENÍ

- voda – rozpouštědlo pro pastu
- pemza – leštící složka s abrazivní schopností pro odstranění plaku. Je v různých hrubostech: jemná, střední, hrubá, extra hrubá
- kukuřičný škrob – pojidlo pasty
- příchutě
- potravinové barvivo
- sacharin – sladidlo
- sodium fluorid – poskytuje fluoridační účinek
- křemík – další leštící složka
- zhušťovače – zabraňují pastě se rozstříkovat
- titan-dioxid – poskytuje jas a lesk pastě a následně i zubům

Základní technika:

1. Naneste prophy pastu na depuralizační kalíšek tak, že kalíšek pomalu otáčíte v pastě. Nepřeplňujte kalíšek, protože toto způsobí jenom rozstříkávání pasty. Aplikujte pastu na zuby za pomalých otáček, zhruba 3000 ot./min. nebo méně.
2. Přiložte kalíšek ve výši 2/3 korunky zubu. Přitlačte na kalíšek během rotace, leštěte 2-3 zuby najednou.
3. Postup opakujte u všech zubů. Průběžně používejte odsávání pro odstranění přebytečné pasty a slin.

Leštění kompozit:

Nedoporučujeme použití pasty na kompozitních výplních, protože tyto nemají schopnost samo-obnovy jako sklovina. Pokud přesto pastu použijete, pracujte jen s jemnou pastou, použijte její min. množství za velmi pomalých otáček.

Zabarvené zuby:

1. Naneste prophy pastu na nezabarvené zuby ležící vedle zubů zabarvených – po jejich vyčištění dostanete vzor odstínu který chcete dosáhnout i u zubů zabarvených.
2. Vyleštěte nejdříve nezabarvené zuby a poté pokračujte u zubů zabarvených. Leštěte zhruba 5 sekund nebo dokud neodstraníte zabarvení. Hrubší pasta odstraní zabarvení rychleji. Pokud potřebujete přidat více pasty, odstraňte z kalíšku nejdříve sliny před přidáním více pasty. To zajistí, že pasta bude mít nejefektivnější leštící vlastnosti.

Typy balení:

530313	Prophy pasta střední s ovocnou příchutí	250 g
530314	Prophy pasta hrubá s mentolovou příchutí	250 g

Objednávky a informace: **Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel: 577 926 226-7**

e-mail: hufa@hufa.cz