

GC RELINE

Tvrký rebazovací materiál pro přímou rebazi.

Pouze pro použití ve stomatologii v doporučených indikacích.

Před použitím čtete pozorně tento návod.

Doporučené indikace

GC RELINE je akrylová pryskyřice pro přímé tvrdé rebaze a extenze pryskyřičných těl náhrad. Tekutina bez obsahu metylmetakrylátu snižuje nepříjemnou vůni a dráždění sliznice.

Kontraindikace

Nepoužívejte u pacientů se známou citlivostí na metakrylát. V případě alergie kontaktujte lékaře.

Návod k použití

1. Zhruběte na náhradě oblast, která má být rebazována. Očistěte a vysušte.
2. Umělé zuby, labiální a bukální povrchy náhrady překryjte vazelínou nebo COE Lubricant Izolační materiál neaplikujte do oblasti 3 mm okraje náhrady. Pro náhrady s umělými zuby aplikujte vrstvu vazelíny na zuby, abyste zabránili adhezi GC RELINE na povrch zubu.
3. Aplikujte na povrch náhrady BONDING AGENT přiloženým štětečkem. Vysušte vzduchem asi 10 vteřin.

Poznámka: BONDING AGENT je těkavý. Uzavřete nádobu okamžitě po použití.

4. Standardní konzistence je dosaženo při poměru 1,8 g prášku na 1 ml (1 g) tekutiny, které se dosáhne odměřením první značky na odměrce prášku a kapátku pro tekutinu. Prášek a tekutinu dejte do kelímku a jemně míchejte 15 vteřin.
5. Plastovou špachtlí naneste pryskyřičnou směs rovnoměrně na slizniční povrch náhrady.
6. Vložte náhradu do úst asi 1 minutu po začátku míchání. Upozorněte pacienta, aby pevně sevřel čelisti v okluzi. Úprava okrajů náhrady pomocí pohybů svalů se provádí obvyklým způsobem.
7. *Pro celkovou náhradu bez podsekřivin:* odstraňte přebytky pryskyřice intraorálně. Náhradu ponechte v ústech, dokud materiál nevytvrdne (asi 5 minut a 30 vteřin od začátku míchání).
8. *Pro celkovou náhradu s podsekřivinami nebo částečnou náhradu:* vyjměte náhradu z úst, když materiál dosáhne gumovitého stádia (asi 2' až 2' 30" od začátku míchání). Upravte přebytky a nasadte náhradu do úst předtím, než začne vyvíjet teplo. Jestliže náhrada zůstane mimo ústa, vložte ji do teplé vody (asi 40 - 50°C) na 3 minuty, dokud zcela neztvrdne.

Poznámka: Jestliže jsou na náhradě retence nebo podsekřiviny, měla by být náhrada vyjmuta z úst v době, kdy je materiál v gumovitém stádiu a předtím, než začne vyvíjet teplo. Jinak by bylo obtížné náhradu vyjmout.

9. Pro rozšíření hranic náhrady: namíchejte materiál mírně hustší než je standardní poměr prášek - tekutina.
10. Vyjměte náhradu z úst asi 5 minut a 30 vteřin od začátku míchání. Upravte a vyleštěte náhradu běžným způsobem.

Upozornění

1. Tekutina a BONDING AGENT jsou těkavé a hořlavé. Zabraňte styku s vysokými teplotami.

2. Po aplikaci BONDING AGENT omyjte štěteček tekutinou GC RELINE nebo ethanolem.
3. Před použitím zatřepejte lahvičkou s práškem.
4. V případě kontaktu s pokožkou důkladně omyjte vodou.
5. V případě kontaktu s očima opláchněte okamžitě vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování

Skladujte za normální teploty 15 - 25° C.
Zaručena tříletá životnost.

Balení obsahuje:

Prášek	8 g
Tekutina	50 ml (50 g)
BONDING AGENT	15 g
Míchací kelímek	
Odměrka na prášek	
Odměrka na tekutinu	

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-7, fax: 577 926 205,
www.hufa.cz, hufa@hufa.cz