

R.T.R. KONUSY/STRÍKAČKY **BIOKOMPATIBILNÍ, SYNTETICKÁ NÁHRADA TKÁNĚ**

VLASTNOSTI

R.T.R. calcium fosfát je běžně používán v nejnovějších technologiích, které garantují extrémní čistotu produktu. R.T.R. je vyroben z B-tricalcium fosfátových granulí potažených matricí vysoce čistých kolagenových vláken hovězího původu, což splňuje zdravotní a bezpečnostní požadavky vyslovené WHO a EU.

R.T.R. je dodáván v granulích ve velikosti 500 μ m 1mm. Velikost makropór je 100 μ m - 400 μ m a mikropóry jsou menší 10 μ m v průměru. Tyto specifické strukturální vlastnosti umožňují nově vznikající kosti kolonizovat makropóry. R.T.R. je postupně resorbovatelný.

INDIKACE

R.T.R. konusy jsou určeny pro náhradu ztráty kostí, které byly impregnovány pacientovou krví nebo fyziologickým roztokem, např. pro výplň zubních lůžek. R.T.R. konusy se používají, když není možno zcela uzavřít lůžko, jakožto granule by mohly z lůžka vytékat.

KONTRAINDIKACE

- akutní osteomyelitis nebo nekróza místa
- degenerace kostí
- známá aktivní infekce
- známá alergie na podstatnou kostní náhradu

UPOZORNĚNÍ

Výrobce garantuje kvalitu materiálu a výrobku. Aby bylo použití R.T.R. úspěšné, je třeba mít na paměti některá rozhodující kritéria:

- přesný výběr pacienta
- rigorózní asepsy

Lékař je zodpovědný za jakoukoliv komplikaci, která je zapříčiněna nesprávným použitím, nesprávnou operační technikou nebo nedostatkem asepsy. Tyto komplikace nelze přenášet na výrobce. Skryté orální patologické jevy, jako je infekce, by měly být nejdříve ošetřeny a vyléčeny. Zamezte kontaminaci slivou.

Kost, která bude v kontaktu s R.T.R. by měla být očištěna, a je-li možno, dobře vaskularizována, aby vzniklo velmi kvalitní lůžko. Jakákoliv nepoužitá část R.T.R. by měla být systematicky odstraňována, jelikož po aplikaci již není produkt sterilní.

Před použitím zkontrolujte neporušenost balení. Nepoužívejte, bylo-li balení poškozeno či dříve otevřeno. Opětovně nesterilizujte.

NÁVOD K POUŽITÍ

R.T.R. konusy jsou vkládány do dentálního lůžka jakmile je naplněno krví. Vždy je lepší místo zásahu sešít. V případě, že šití není možné, dbejte na to, aby konus byl zcela zakryt a chráněn okrají rány.

SKLADOVÁNÍ/EXPIRACE

Skladujte pouze v originálním balení. Nepoužívejte po vypršení expirace, která je uvedena na balení.

BALENÍ

2x0.3cm³ konusy (průměr 6mm, H10mm) v jednotkovém balení sterilizované gamma zářením (min. dávka 25kGy)

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205,
e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz