

RACESTYPTINE

Roztok pro dentální použití

Složení:

hydratovaný aluminium chlorid	25.00g	
8-hydroxyquinolin sulfát	0.10g	
přísady		čistá voda alkohol

Indikace:

- gingivální exsudáty a gingivální krvácení
- apikální krvácení
- gingivální retrakce

Upozornění:

Nepoužívejte přípravek v případě následujících situací:

- možná alergie na aluminium (vyjimečně)
- hypersenzitivita a fotosenzitivita na quinoleické prvky

Zabraňte požití! V případě pochybností kontaktujte dodavatele.

Během aplikace dbejte:

- aplikujte jedině potřebný počet kapek
- omezte, na nutnou dobu, kontakt roztoku s mukózním povrchem
- ihned jakmile bylo dosaženo hemostázy nebo byl sejmout otisk, průběžně vypláchněte místo aplikace, aby zde nebyla zanechán pozůstatek alumina – může způsobit podráždění.
- Nepoužívejte preimpregnovanou medicínální nit

Návod k použití:

- Gingivální retrakce
Prvně vsuňte gingivální retrakční nit (ne medicínální) do sulkusu, poté impregnujte nit v místě aplikace velice opatrně několika kapkami roztoku – použijte pipetu. Nechejte nit na místě 3 – 5 minut, poté odstraňte a přesvědčte se, že v gingiválním sulkusu nezůstaly žádné fragmenty. Poté dobře vypláchněte.
- Gingivální exsudace a gingivální krvácení
Kápněte jednu či dvě kapky roztoku do gingivy pomocí pipety nebo bavlněného hadříku. Počkejte 1 – 2 minuty a poté důkladně vypláchněte místo aplikace.
- Apikální krvácení
Kápněte jednu nebo několik kapek roztoku do kavity korunky pomocí pipety, gázového tamponku či papírového čepu (od 2 do 5 kapek na aplikaci). Jakmile je dosaženo hemostázy důkladně místo aplikace vypláchněte.

Vedlejší efekty:

Jako ostatní aktivní ingredience, tento lék může u některých pacientů v menší či větší míře vyvolat vedlejší efekty:

- riziko alergie
- riziko většího či menšího lokálního zánětu, způsobeno přemírou použitého roztoku, dlouhou dobou aplikace či špatným vypláchnutím mukózy

Balení:

Roztok pro dentální použití

Lahvička 13ml

Lahvička 45ml

Skladování:

Skladujte na tmavém místě v teplotě do 25°C. Nepoužívejte po vypršení expirace!

Farmako-terapeutické zařazení:

Dentální produkt pro profesní použití

Výrobce:

Septodont, Francie