

## RESO PAC

### První pasta na ošetření ran ...

- kterou není třeba odstraňovat
- která je hydrofilní a pomalu se rozpouští
- která přilne k vlhkým a krvácivým ranám
- která se neodlupuje
- která obsahuje myrhu (zpevňuje dásně, adstringentní, hemostatická)

### Složení

karboxymetylová celulóza, polyvinyl acetát, etyl alkohol, myrha, vazelína, polyethylenoxidová pryskyřice

### Návod k použití

1. Vytlačte požadované množství Reso-Pac z tuby na navlhčené prsty nebo rukavici.
2. Vytvarujte materiál do tenké roličky (případně pod tekoucí vodou) a zatlačte na místo aplikace. Používejte materiál střídavě, je polikán při odnášení slinami.
3. Léčba pod aplikací Reso-Pac je účinná 4 hodiny.
4. Povrch periodontického ošetření by měla být vyhlazena vazelínou nebo dobře navlhčenými prsty.
5. Tubu s materiálem ihned uzavřete. Hmota rychle tvrdne.

### Upozornění:

Upozorněte pacienta, aby se vyvaroval horkého jídla nebo horkých nápojů. Materiál by byl předčasně rozpuštěn.

Reso-Pac je orální pasta na ošetření ran, která obsahuje převážně celulózu. Produkt je možno také použít jako nosič léčiva nebo nosič hemostatik a fluoridu. Díky svému složení velmi dobře přilne k vlhkým a krvácivým ranám. Rozmanitost léčby s Reso-Pac je velká: je to vynikající na zakrytí ran po extrakci zubů, když je třeba ránu chránit před mechanickým podrážděním a znehynění přilehlé tkáně není možno garantovat. Jakákoliv chirurgická incise, která je uzavírána šitím, by měla být pokryta Reso-Pacem pro zajištění následné ochrany. Chrání kost nahrazující materiály a membrány od bakteriální infekce. Bez žvýkání nebo manipulace produkt přilne na cca 30 hod, ale v jakémkoliv dalším případě je dostatečně odolný pro zakrytí rány. Reso-Pac je možno využít jako nosič léčiva a proto je vhodný pro použití při léčbě pacientů vyžadujících antikoagulanty. Miradont-gel (mikronutriční gel) a Myzotect-Tincture (myrha/benzoin tinktura) jsou vhodné doplňky, které při použití před aplikací Reso-Pac mají tišivý efekt a mohou napomoci urychlení léčby.

### **AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:**

**Hu-Fa Dental**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)