

SEPTOJECT

Jehly pro dentální stříkačky

Barevně kódovaný uzávěr okolo ochranného plastického pouzdra zaručuje sterilitu jehly. Barva koresponduje poloměru jehly.

Indikace:

Tyto jehly jsou určeny k běžnému použití při aplikaci lokálních anestetik. Jehly X-krátké a krátké jsou určeny pro periapikální injekce. Dlouhé jehly jsou určeny pro injekce blokuující nervy.

Návod k použití:

Nasazení jehly na stříkačku:

- Rozlomte sterilizační uzávěr otáčením dvou částí plastického pouzdra v opačných směrech
- Oddělte dvě části pouzdra sejmutím čepičky
- Našroubujte plastickou hubici na stříkačku držením za zbylou část pouzdra – chrání druhý konec jehly
- Odstraňte zbytek pouzdra jemným otáčením, a to vždy těsně před použitím
- Po použití jehlu odšroubujte a odhodte do odpadu. Jehly nejsou sterilizovatelné

Balení:

Krabička 100 X-krátkých jehel – barevný kód zelený

Krabička 100 krátkých jehel – barevný kód zelený

Krabička 100 krátkých jehel – barevný kód žlutý

Krabička 100 dlouhých jehel – barevný kód žlutý