

SEPTOCALM

Lokální kauterizátor

Složení:

35% vodný roztok kyseliny trichloroctové, karamelová příchut'

Vlastnosti:

Leptavý efekt kyseliny trichloroctové okamžitě zbavuje pacienta bolesti a urychluje přirozený hojivý proces díky stimulaci regenerace poškozených orálních mukózních membrán.

Indikace:

Kauterizace tkáňových ulkusů, např. aftózní stomatitidy

Kontraindikace:

Alergie na některý z činitelů.

Děti mladší 7 let.

Návod k použití:**1. Peletky**

Po pečlivé izolaci a vysušení zasažené mukózní membrány nerezovou pinzetou naberte peletku naimpregnovanou roztokem. Veškerý přebytečný roztok odstraňte zmáčknutím a zformováním peletky do malého pohárku. Poté aplikujte na zasaženou oblast. Po aplikaci pečlivě vypláchněte.

2. Roztok:

Po pečlivé izolaci a vysušení zasažené mukózní membrány nerezovou pinzetou navlhčete bavlněnou peletku roztokem. Veškerý přebytečný roztok odstraňte zmáčknutím peletky. Poté aplikujte na zasaženou oblast. Po aplikaci pečlivě vypláchněte

Upozornění:

Nepolykejte. Neaplikujte jinam než na zasažené místo. Neaplikujte na povrch zubu.

Korozivní. Nebezpečné životnímu prostředí. Může způsobit popáleniny. Zabraňte kontaktu s pokožkou a zrakem. V případě zasažení zraku, okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě nevolnosti vyhledejte ihned lékaře.

Balení:

lahvička s roztokem 13 ml

lahvička obsahující 50 ks naimpregnovaných peletek

Skladování:

Skladujte při max. teplotě do 25°C. Dbejte na dokonalé uzavření lahvičky

Farmako-terapeutické zařazení:

Dentální produkt pro profesní použití

Výrobce:

Septodont, Francie

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice,

tel.: 577 926 226-7, fax: 577 926 205,

www.hufa.cz, hufa@hufa.cz