

Silosept

Přípravek pro ponornou desinfekci a čištění otisků a náhrad.

INDIKACE

Pro čištění a desinfekci silikonových, alginátových a polyéterových zubních otisků a dentálních náhrad.

VLASTNOSTI

Smíchaný roztok je mikrobiologicky vysoce efektivní a důkladně čistí již po 10 minutách ponoření – je kompatibilní s otiskovacími materiály, které zůstávají objemově stabilní.

POUŽITÍ

1. Přidejte 2 odměrky (20 g každá) Siloseptu do 2 l jemně teplé vody (vznikne 2% roztok).
 2. Opláchněte otisk nebo náhradu pod tekoucí vodou a poté ponořte do roztoku.
 3. Nechejte 10 min. reagovat, poté vyjměte a opětovně opláchněte pod tekoucí vodou.
 4. Na desinfikovaný otisk můžete nalepit přiloženou nálepku pro jasnou identifikaci desinfikovaných otisků.
- Roztok zůstává účinný 20 hodin, je proto nutné **měnit desinfekční roztok DENNĚ**.

MIKROBIOLOGICKÁ ÚČINNOST

2% roztok Siloseptu deaktivuje mikrobiální spektrum – bakterie, fungi, HBV, HIV a TbB – během 10 minut dojde k jejich biologické degradaci.

SLOŽENÍ: 100g Siloseptu obsahuje: 20g potasium peroxy-monosulfát, 15g sodium benzoát a 10g kyseliny vinné.

UPOZORNĚNÍ:

Roztok irituje oči a kůži. V případě kontaktu s roztokem do očí, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě kontaktu s kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz
