

Skyce

Návod k použití

Popis

Skyce je soubor kamínků z krystalového skla. Kamínky se připevňují na labiální povrchy přirozených horních frontálních zubů bez předchozí preparace.

Barvy a velikosti

Velikosti

Skyce se dodává ve dvou velikostech a barvách:

Průměr 1,8mm

Průměr 2,5mm

Barvy

- transparentní
- modrá (safír)

Aplikace

1. Aplikace kofferdamu

Aby se zabránilo vdechnutí nebo spolknutí ornamentů, je nutná aplikace kofferdamu.

2. Očištění

Opatrně očištěte kontaktní povrch za použití rotačních kartáčků a kalíšků a leštící pasty (např. Proxýt).

3. Leptání kyselinou orthofosforečnou

Na kontaktní povrch naneste gel 37% kyseliny orthofosforečné (např. Total Etch). Sklovinu je nutno pro připevnění orální bižuterie upravit, a tak povrch zubu musí být leptán alespoň 60sec. Naleptaný povrch musí být o něco větší než je průměr kamínku. Následně opatrně odstraňte kyselinu orthofosforečnou vodním sprejem a zub vysušte.

4. Sklovinný bond

Na naleptanou sklovinu naneste tenký povlak Heliobondu a rozfoukejte vzduchem.

5. Aplikace orální bižuterie

Naneste Heliobond na čistou zadní část bižuterie. Potom umístěte kamínek do požadované pozice. Část Heliobondu by měla v této chvíli vytéci.

POZOR! Pro zajištění makroretence obkružte kamínek štětečkem namočeným v Heliobondu. Heliobondl zajišťuje vazbu a hladké, navazující spojení mezi Skyce a zubem. Následuje fotopolymerace skrz zub z meziálního, distálního a palatinálního směru alespoň 40sec z každého směru (pomocí např. lampy Astralis).

Důležité upozornění

Orální bižuterie by měla být nabízena včetně vytvrzení Heliobondu (viz obr.).

6. Odstranění přebytků

Normálně by neměly být žádné přebytky. Jestliže se kumulují malé přebytky kolem kamínku, musí se dát velký pozor při jejich odstraňování. Rotační nástroj se nesmí dotknout kamínku. Doporučují se silikonové nástroje.

Poznámky:

1. Je lepší umístit kamínek na sondu, a tak jej aplikovat na povrch zubu.
Pro přilepení kamínku na špičku sondy můžete použít malé množství lepivého materiálu z konce tyčinky VivaStick nebo měkký vosk.
2. Pokud je zadní strana kamínku kontaminována (dotyk prsty nebo sliny), měl by být opstrně očištěn v alkoholové lázni a osušen bavlnou nebo akrylátovou peletkou.
3. Pokud chcete více informací o vedlejších účincích a interakcích bondu a gelu kyseliny orthofosforečné, nahlédněte do příslušných návodů na použití.

Uchovávejte z dosahu dětí

Pouze pro použití ve stomatologii.

Datum vyhotovení návodu:

13.04.200

Zaváděcí balení

1 Heliobond 6g
1 Total Etch 2g
5 Skyce 1,8mm transparent
2 Skyce 2,5mm transparent
2 Skyce 1,8mm safír
1 Skyce 2,5mm safír
2 VivaStick

Doplňková balení

5 Skyce (všech velikostí a barev)

Výrobce

Vivadent Ets.
FL-9494 Schaan
+ výrobek Vivadent

Tento materiál byl vyvinut pouze pro užití ve stomatologii. Zpracovávání musí být striktně podle návodu použití. Za škody způsobené jiným nebo nesprávným použitím nepřijímá výrobce žádnou zodpovědnost.

Tímto je uživatel zodpovědný za otestování materiálu z hlediska jeho vhodnosti při použití materiálu pro jiné účely než je uvedeno v návodu k použití.