

***Návod k použití rebazovací hmoty TOKUSO REBASE***

- zkontrolujeme přizpůsobivost
- očistíme a zdrsíme povrch zubní náhrady
- štětečkem nanese Adhesiv (na plochu, která bude rebasována)
  - o Do okrajových částí nanese Adhesiv dvakrát.
  - o Adhesive zůstává aktivní 10 minut po nanesení,
- Mícháme Rebase II
  - o Prášek s tekutinou mícháme v poměru 2 díly tekutiny na 1 díl prášku spatulí cca 5–10 sekund, abychom minimalizovali bubliny.
  - o Jako první dáváme do míchací nádoby tekutinu a potom prášek
- Spatulí aplikujeme pryskyřici
  - o Cca 20 – 60 sekund po namíchání aplikujeme na plochu určenou k rebazi.
  - o Vložíme zubní náhradu do úst, odstraníme přebytečnou pryskyřici.
  - o Do úst vkládáme cca 60 – 90 sekund od začátku míchání.
- Pacient zapojí lícní svaly, našpulí ústa, aby se náhrada dobře usadila.
- Začne-li pryskyřice tuhnout vyjmeme náhradu a je-li třeba odstraníme přebytky. Potom znovu vložíme náhradu do úst a vyčkáme úplného ztuhnutí (cca 3 – 5,5 minuty od zahájení míchání).

***Pro zvýšení tvrdosti můžeme připravit roztok Hardener II.***

- Vložíme náhradu do roztoku (do 200 ml, 40 – 60°C teplé vody dáme 1 odměrku Hardener II) na cca 3 minuty.
- Opláchneme a osušíme
- Obrousíme přebytky, přegumujeme a vyleštíme (tvrdokovovou frézkou, leštícím kotoučem apod.).
- Překontrolujeme přizpůsobivost.