

# AH 26

## Kořenová výplňová hmota na bázi epoxidové pryskyřice

### **Složení:**

8g prášku obsahuje: Stříbro - prášek 0,8g  
Oxid bizmutitý 4,8g  
Metenamín 2,0g  
Oxid titančitý 0,4g

7,5g pryskyřice obsahuje: Epoxybisfenolovou pryskyřici 7,5g

### **Indikace:**

Plnění kořenových kanálků

- KONTRAINDIKACE nejsou známy
- VEDLEJŠÍ ÚČINKY nejsou známy
- INTERAKCIE S JINÝMI LÁTKAMI nejsou známy

### **Dávkování a použití:**

1. Poměrově 2-3 díly prášku na 1 díl pryskyřice naneste na tenkou skleněnou podložku a čistou kovovou lopatkou pořádně promíchejte (asi tolik prášku, aby se směs odtrhávala, když lopatku odtáhnete od sklíčka na 1,5 - 2,5 cm). Tuba by měla být vždy uzavřená.
2. Lehké zahřátí hmoty na skleněné podložce 5-10 cm nad plamenem způsobí, že směs se stane řidší (tekutější) a lépe dá naplnit kanálek. Toto zahřátí je možné opakovat vícekrát bez negatívních následků na hmotu.
3. Po dobrém vypláchnutí a vysušení kanálku plňte rotačním kořenovým plničem. Jestliže jste vyplachovali roztokem  $H_2O_2$ , je nutno vypláchnout ho ještě roztokem NaCl, aby případně uvolněný kyslík z  $H_2O_2$  neovlivnil hustotu kořenové výplně. Tvorbě vzduchových bublin předejdete tak, že po zaplnění kanálku ještě jednou zavedete plnič při velmi pomalých otáčkách do kořenového kanálku až po apex a pomalu ho vytáhnete (při stejně pomalé rotaci). Abyste předešli přeplnění kanálku, můžete místo rotační spirály použít při plnění Reamerův nástroj nebo kořenový plnič, kterým se hmota do kanálku nanáší rotací proti směru hodinových ručiček. To se doporučuje především tam, kde AH-26 kombinujete s gutaperčovými nebo stříbrnými čepy.
4. Kořenové výplně z AH26 se lehce odstraní z kořenového kanálku nástroji k tomu určenými, jestliže výplň současně změkčujete malým množstvím chloroformu.
5. Lopatku, skleněnou podložku a nástroj je třeba čistit co nejdříve po použití pomocí alkoholu, acetonu nebo chloroformu.

### **Pokyny:**

1. RTG - kontrastnost se zvýší přidáním většího množství prášku.
2. AH 26 tuhne při tělesné teplotě za 36-48 hod., při pokojové teplotě potřebuje k tuhnutí 5-7 dní.
3. Po uplynutí expirační doby už hmotu nepoužívejte.

Chraňte před dětmi!



Moravní 909, 765 02 Otrokovice, Tel.: 067/ 792 62 26-27, Fax: 067/ 792 62 05