

ASPIRAČNÍ STŘÍKAČKA

NASAZENÍ

1. Zcela vytáhněte píst stříkačky za palcový držáček až do místa, kde se píst zastaví.
2. Vsuňte 1.8ml kártridž do stříkačky, koncem s plunžrovým pístem nejdříve.
3. Kártridže na místě pevně podržte. Stiskněte píst dopředu rychlým zatlačením. Palcovým držáčkem pootočte cca o ¼.
4. Jehlu připevněte na aspirační stříkačku dle instrukcí výrobce.
5. Aspirujte před aplikací injekce. Zpětný pohyb plunžrového pístu způsobí aspiraci.

SEJMUTÍ

1. Vytáhněte píst, jak je uvedeno v kapitole „Nasazení“. Tím dojde k uvolnění aspirační harpunky z plunžrového čepu kártridže.
2. Je-li třeba, k sejmutí jehly použijte palec.

DOPORUČENÁ STERILIZACE

Doporučujeme sterilizaci stříkačky po každém použití. Je možno ji sterilizovat v autoklávu a poté skladovat v suchém sterilním prostředí nebo v alkoholovém roztoku (např. čistý roztok isopropylu alkoholu či v 70% etyl alkoholu).

ÚDRŽBA STŘÍKAČKY

Pro zajištění bezproblémového používání stříkačky, je třeba stříkačku vždy rozebrat a očistit od zbytků krve a slin. Parafín, který se může naakumulovat na harpunce, je třeba otřít kartáčkem. Protékání během aplikace injekce je většinou způsobeno excentrickým vpichem v tenké gumové přepážce na špičce kártridže. Abyste tomuto zabránili, je třeba dbát na to, že jehla je, v okamžiku penetrace membrány, nasazena rovně.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz