

GC Cervical Cement



Skloionomerní cement pro senzitivní krčkové a kořenové léze.

GC Cervical Cement je skloionomerní cement, vyvinutý pro ošetření hypersenzitivních, lehce abradovaných krčkových nebo kořenových ploch. Tento cement má nízkou viskozitu, takže se snadno a přesně aplikuje štětečkem na zubní povrch. Samozřejmě představuje běžné výhody skloionomerních cementů, jako je chemická vazba k zubní tkáni, biokompatibilita a vynikající estetika. Bolest odstraňuje okamžitě a dlouhodobě.

Vlastnosti:

- Pokud je Cervical Cement připraven podle návodu, má výhodnou konzistenci, se kterou lze snadno aplikovat na zubní povrch.
- Po aplikaci rychle tuhne.
- Pevně adhezuje k zubním tkáním.
- Má vynikající biokompatibilitu, nedráždí pulpu ani jiné tkáně.
- Po aplikaci a ztuhnutí zůstává povrch cementu lesklý a barevně stálý po dlouhou dobu.

Indikace:

Pečetění hypersenzitivních, lehce abradovaných krčkových nebo kořenových ploch.

Návod k použití:

• *Aplikace GC Dentin Conditioneru:*

1. Očistěte povrch léze.
2. Dentin Conditioner nanášejte pomocí houbiček na ošetřenou plochu.
3. Omyjte, osušte a aplikujte Cervical Cement. Po aplikaci Dentin Conditioneru oplachujte vodou asi 20-30 sek. Osušte zubní povrch, zub nevysušujte. Okamžitě aplikujte již namíchaný Cervical Cement pomocí štětečku nebo jinými podobnými nástroji.

• *Míchání:*

1. Správná konzistence je dodržena, pokud namícháte jednu zarovnanou lžičku s jednou kapkou tekutiny. Konzistenci a dobu tuhnutí můžete ovlivnit poměrem prášku a tekutiny.
2. Umístěte požadované množství prášku a tekutiny na papírovou podložku. Prášek rozdělte na dvě stejné části. Jednu z nich inkorporujte do tekutiny. Míchejte 5-7 sek umělohmotnou špachtlí, abyste získali konzistenci podobnou mléku a pak přidejte druhou část. Míchejte dalších 8-10 sek do té doby, než získáte plně homogenní směs. Nemíchejte celkově déle než 15 sek!
3. Pokud jste dosáhli požadované hustoty předtím, než byl vypotřebován všechny prášek, není nutno přidávat zbývající části.

• *Aplikace cementu:*

1. Malé množství směsi naberte na štěteček a naneste na požadovanou plochu. Dejte pozor - neaplikujte příliš mnoho přípravku. Po aplikaci se povrchu nedotýkejte - cement tuhne rychle.
2. Nanášejte 2 až 3 vrstvy. Pokud cement již nestéká, neaplikujte další vrstvy, aby povrch nebyl hrubý.
3. Směs, která vtekla na gingivu, může být odstraněna běžnými nástroji.
4. Jestliže je krčkový defekt větší, použijte skloionomerní výplňový cement Fuji II LC Improved.