

DAY WHITE 2Z

Bělící Instrukce

Zkontrolujte si své balení DAY WHITE 2Z mini kit a ujistěte se, že obsahuje vše co potřebujete pro bělení zubů: *2 stříkačky s gelem a 2 aplikační koncovky*. Postupujte přesně podle návodu. Pokud máte nějaké otázky nebo pokud pocítíte více než mírnou citlivost, přerušete proces a kontaktujte svého lékaře.

POSTUP

1. Vyčistěte si důkladně zuby kartáčkem a dentální nití. Sundejte ze stříkačky plastický kryt a nahraďte jej aplikační koncovkou.
2. Dejte malou kapku gelu do každé sekce Vašeho individuálního nosiče (obr. 1). Doporučená velikost kapky viz obr. 2. Pamatujte, že se jedná pouze o doporučenou velikost – pokud máte malé zuby, použijte menší kapku. U větších zubů, použijte mírně větší kapku gelu. Každá stříkačka má 12 dávkovacích dílků. Použijte maximálně 1 dílek na 1 nosič a aplikaci.
3. Jakmile dokončíte aplikaci gelu do nosiče, sundejte aplikační koncovku ze stříkačky a nahraďte ji plastickým krytem.
4. Vložte nosič s gelem do úst. Dejte pozor ať gel nevytlačíte ven z nosiče, ale zároveň zajistěte, ať je nosič kompletně usazen na Vašich zubech (obr.3)
Během aplikace můžete vidět, jak gel uvnitř nosiče „bublá“ – toto bubláni je součástí bělicího procesu.
5. Odstraňte přebytky gelu prstem nebo suchým kartáčkem. Pokud zjistíte zbělení Vašich dásní, mělo by se jednat pouze o přechodný stav trvající 5-10 min. Je to důkaz, že používáte příliš mnoho gelu – příště ho použijte trochu méně.
6. Noste formy po dobu minimálně 30 minut, avšak ne déle než 1 hodinu.
7. Po uplynutí doby sundejte nosič, vypláchněte a vyčistěte si gel ze zubů a dásní. Propláchněte nosiče studenou vodou (horká voda je může zdeformovat) a pomocí kartáčku odstraňte zbytky gelu. Uschovejte nosiče do krabičky a uložte ji na chladné a suché místo.
8. Zopakujte kroky 1-7 pro každou aplikaci. Pro optimální výsledek bělíte zuby 2 krát denně. Pokud pocítíte mírnou citlivost, počkejte vždy minimálně 1 hodinu mezi aplikacemi.

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, Tel.: 577 926 226-27, Fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz