


ELITE ORTHO

thyxotropní ortodontická sádra, typ 3




poměr voda/prášek:
24 ml/100 g

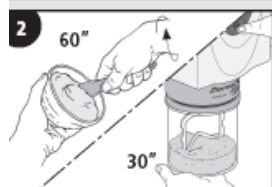

míchat 60/30 vteřin




odlejte na vibrátoru

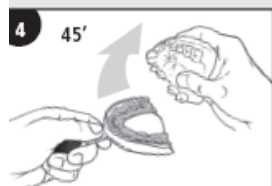


sejměte po 45 vteřinách

ELITE ARTI


thyxotropní artikulační sádra, typ 3

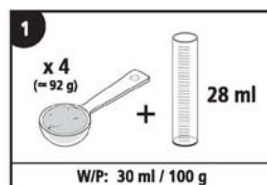

poměr voda/prášek:
30 ml/100 g

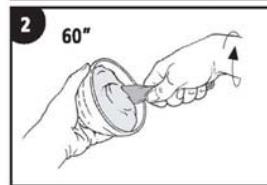

míchat 60 vteřin

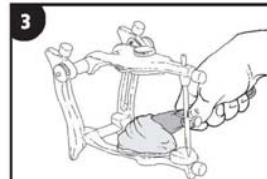


umístěte na artikulátor

ELITE ARTI FAST

thyxotropní, rychle tuhnoucí artikulační sádra,
typ 3



poměr voda/prášek:
30 ml/100 g

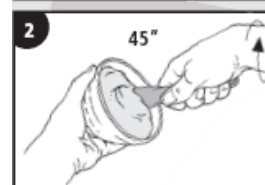


míchat 45 vteřin




umístěte na artikulátor

ELITE BASE

dentální sádra pro báze, typ 4

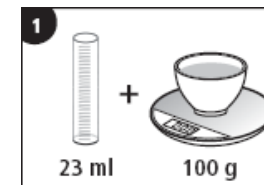

poměr voda/prášek:
23 ml/100 g

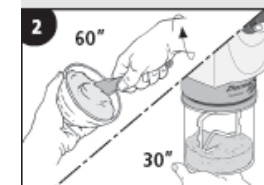

míchat 60/30 vteřin



odlejte na nosič
báze



sejměte po 45 vteřinách

poměr voda/prášek: 24 ml/100 g
pracovní čas: 7'
čas tuhnutí: 14'
expanze: 0.04%
kompresní síla: 1 h 32 Mpa


poměr voda/prášek: 30 ml/100 g
pracovní čas: 3'
čas tuhnutí: 5'
expanze: 0.02%
kompresní síla: 1 h 26 Mpa

poměr voda/prášek: 30 ml/100 g
pracovní čas: 2'
čas tuhnutí: 3'
expanze: 0.02%
kompresní síla: 1 h 26 Mpa


poměr voda/prášek: 23 ml/100 g
pracovní čas: 5'
čas tuhnutí: 18'
expanze: 0.05%
kompresní síla: 1 h 40 Mpa

ELITE ROCK


thyxotropní, extra tvrdá sádra, typ 4

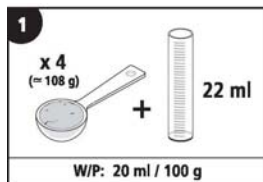


poměr voda/prášek:
20 ml/100 g

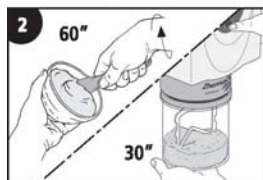

míchat 60/30 vteřin

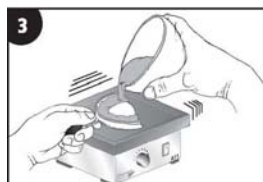

odlejte na vibrátoru

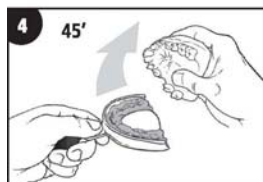


sejměte po 45 vteřinách


poměr voda/prášek: 20 ml/100 g
pracovní čas: 12'
čas tuhnutí: 14'
expanze: 0.08%
kompresní síla: 1 h 52 Mpa

ELITE ROCK FAST


thyxotropní, rychle tuhnoucí, extra tvrdá sádra,
typ 4

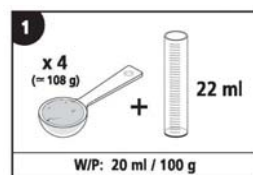


poměr voda/prášek:
20 ml/100 g

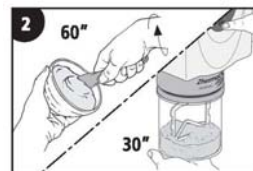

míchat 60/30 vteřin

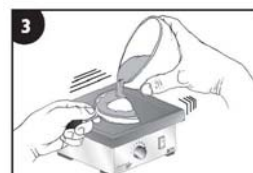

odlejte na vibrátoru

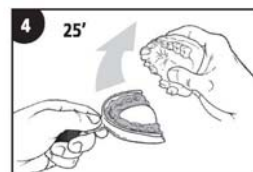


sejměte po 25 vteřinách


poměr voda/prášek: 20 ml/100 g
pracovní čas: 5'
čas tuhnutí: 9'
expanze: 0.08%
kompresní síla: 1 h 52 Mpa

ELITE STONE


thyxotropní, chrom-dentální sádra, typ 4

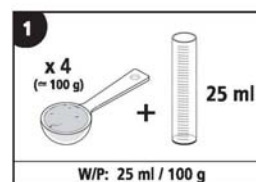


poměr voda/prášek:
25 ml/100 g

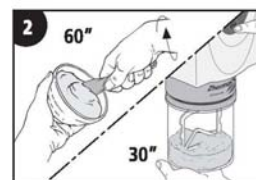

míchat 60/30 vteřin

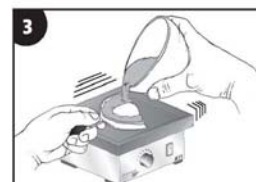

odlejte na vibrátoru

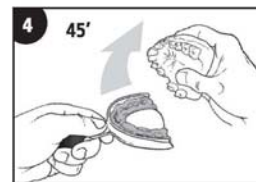


sejměte po 45 vteřinách


poměr voda/prášek: 25 ml/100 g
pracovní čas: 8'
čas tuhnutí: 14'
expanze: 0.08%
kompresní síla: 1 h 42 Mpa

ELITE MODEL

thyxotropní, modelovací dentální sádra,
typ 3

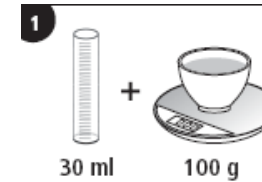


poměr voda/prášek:
30 ml/100 g

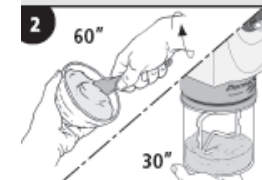

míchat 60/30 vteřin



odlejte na vibrátoru

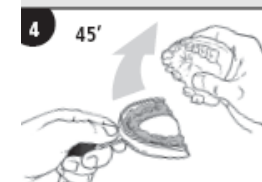


sejměte po 45 vteřinách


poměr voda/prášek: 30 ml/100 g
pracovní čas: 7'
čas tuhnutí: 12'
expanze: 0.04%
kompresní síla: 1 h 31 Mpa

ELITE MODEL FAST

thyxotropní, rychle tuhnoucí modelovací
dentální sádra, typ 3

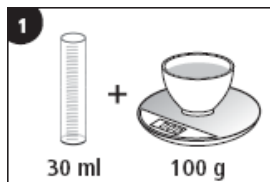


poměr voda/prášek:
30 ml/100 g

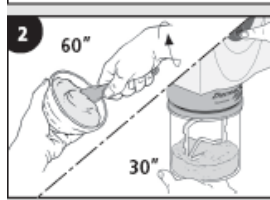

míchat 60/30 vteřin




odlejte na vibrátoru

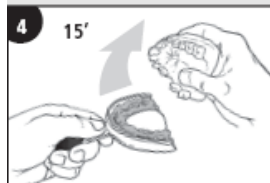


sejměte po 15 vteřinách

ELITE MASTER

extra tvrdá, pryskyřičí zesílená dentální sádra
na pevné protézny a implantáty, typ 4

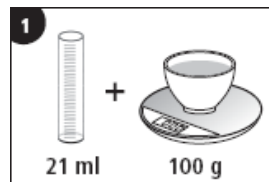


poměr voda/prášek:
21 ml/100 g

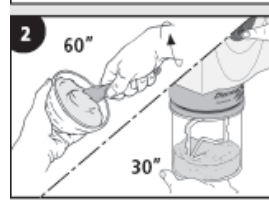

míchat 60/30 vteřin



odlejte na vibrátoru

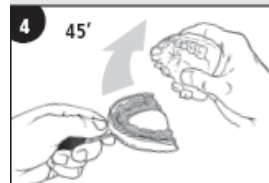

sejměte po 45 vteřinách

poměr voda/prášek: 35 ml/100 g
pracovní čas: 4'
čas tuhnutí: 8'
expanze: 0.01%
kompresní síla: 1 h 36 Mpa

poměr voda/prášek: 21 ml/100 g
pracovní čas: 12'
čas tuhnutí: 14'
expanze: 0.08%
kompresní síla: 1 h 50 Mpa