

GC FREEGENOL

TEMPORARY PACK

* Dočasný cement bez EUGENOLU *

Výhody:

- bez eugenolu
- snadné odstranění a čištění
- rychlé tuhnutí
- velmi dobré vtékání
- možnost úpravy tvrdosti a času tuhnutí dle potřeby

Návod k použití:

1. Vytlačte stejné množství báze a akcelérátoru na podložku.
2. Míchejte po dobu 20-30 sekund, dokud není docíleno homogenní pasty.
3. Smíchanou pastu naneste do dočasné korunky nebo můstku a nasad'te na suchý vypreparovaný zub.
4. Po vytužení (3 minuty) odstraňte přebytky běžným způsobem.

Upozornění:

- Dobu tuhnutí můžete upravit v případě, že změníte množství báze (více báze pro rychlejší tuhnutí a méně báze pro pomalejší tuhnutí). Dodržujte poměr báze / akcelérátor v mezích 3:2 nebo 2:3.
- Tvrdost může být snížena přidáním určitého množství vazelíny.

Balení

1-1 balení: 55 g báze, 20g akcelérátoru, 2g ZOE-Clean (čistič) a míchací podložky.

Váš dodavatel:

MUDr. Petr Veit - Hu-Fa Dental Zlín, Moravní 909, 765 02 Otrokovice