

## GC Fuji Varnish



Aby cement neztratil lesk a správně ztuhl, používáme ochranný lak GC Fuji Varnish. Aplikujte jej na ošetřená místa a pak osušte lehce vzduchem. Konečná úprava výplně, je-li nutná, může být provedena po 20 min. nebo následující den. Doporučujeme používat GC SMOOTH CUP, GC SILIKONE POINT atd.

### **Poznámky:**

1. Doporučujeme pacientovi, aby změnil techniku čištění zubů.
2. Zabraňte kontaktu tekutiny nebo směsi s kůží a s oblastí kolem očí.
3. Vzduchové bubliny v lahvičce s tekutinou odstraňte jejím otočením ústím dolů.
4. Jestliže tekutina ztuhne v ústí lahvičky, odstraňte ji vlhkou gázou, abyste mohli příště dávkovat bez problémů.
5. Po skončení aplikace očistěte a osušte štěteček před tím než cement ztuhne. Pokud se tak již stane, použijte rozpouštědlo.
6. Výrobek je nevhodný pro pacienty s alergií na skloionomerní cementy.

### **Skladování:**

Skladujte v chladném a tmavém místě (4-25°C). Doba trvanlivosti min. 3 roky.



Moravní 909, 765 02 Otrokovice, Tel.: 067/ 792 62 26-27,  
Fax: 067/ 792 62 05