

LIFE – NÁVOD K POUŽITÍ

POUŽITÍ:

Life je radioopákní rychle tuhnoucí materiál založený na bázi calcium hydroxidu. Používá se přímou či nepřímou dřeňovou výplň nebo jako cementová báze pod všechny restorační výplňové materiály, a to včetně amalgámů. Materiál se snadno připravuje a poskytuje dostatečný aplikační čas, aby mohl být aplikován na více míst.

Na míchací podložku vytlačte patřičné množství báze a katalyzační pasty. Po každé aplikaci otřete hrdlo tuby a dbejte na to, abyste nezaměnili vršky jednotlivých tub.

Směs míchejte malou spatulou po dobu cca 10 vteřin, dokud není vše dobře smíseno. Směs ihned aplikujte. K aplikaci použijte čistý a suchý aplikátor. Špičku aplikátoru pokaždé před novým nabráním směsi patřičně očistěte, abyste zamezili kontaminaci zbylého materiálu.

Čas tuhnutí se může lišit v závislosti na nižší relativní vlhkosti. Je možné čas tuhnutí zkrátit jemným navlhčením materiálu tamponem.

Doporučujeme před použitím provést test kompatibility materiálu umístěním vzorku bondu na povrch připravené směsi Life na míchací podložce.

CHARAKTERISTIKA:

- Umožňuje formaci sekundárního dentinu
- Vynikající zatékavost díky čemuž lze provádět kontrolovanou aplikaci
- Zachovává si své vlastnosti v případě expozice
- Dobré tlakové vlastnosti
- Izoluje dřeň proti termálnímu šoku
- Nezabraňuje polymeraci kompozitů
- Odolný proti leptání
- Ochraňuje dřeň před trvalými výplněmi
- Je radioopákní

DOBA ZPRACOVÁNÍ:

Doba zpracování materiálu na míchací podložce by měla být při teplotě cca 23°C a 50% relativní vlhkosti:

- minimálně 6 minut u sady Life Regular
- minimálně 2 ½ minuty u sady Life Fast

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

Sealapex skladujte na chladném místě (10 – 25°C). Materiál by měl být aplikován při pokojové teplotě (18 – 24°C). Urychlení tuhnutí docílíte zvýšením teploty a relativní vlhkosti.

AKTIVNÍ PRVKY:

12 g báze obsahuje:
5.82 g calcium oxidu
1.56 g oxidu zinku

12 g katalyzátoru obsahuje:
5.40 g disalicylu a trisalicylu pryskyřice
0.60 g methyl-salicylu

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů kontaktujte firmu:

**Hu-Fa Dental
Moravní 909
765 02 Otrokovice,
Tel: 577 926 228-29, Fax: 577 926 205
e-mail: hufa@hufa.cz
www.hufa.cz**