

MOLLOSIL


OBECNÉ INFORMACE

Měkká A-silikonová rebazovací hmota pro přímou rebazi.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ


- vhodná pro všechny polymethylmethakryátové syntetika
- rychlá, snadná a okamžitá příprava permanentně měkké rebaze
- kontrola tlakových oblastí na horní/spodní čelisti
- přidání A-silikonu v případě adhezních problémů nebo v případě ochablých dásní
- zpevnění pozice horní/spodních protéz zlepšením adheze
- elastické pokrytí dásňových alveolárních procesů
- uložení implantátů a oprav pro použití během léčby

NÁVOD K POUŽITÍ

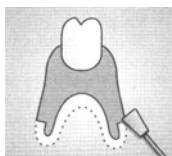

1. Příprava protézy

Nejdříve je třeba zcela odstranit starou rebazi (obr. 1). Základnu protézy obruste cca 1 – 2 mm. Okraje by měly být kompletně zdrsňené, alternativně, připojte nosič (2 – 3 mm vysoký) na vestibulárním a dorsálním, resp. linguálním okraji. Zakulat'te okraje a protézu postupně vyčistěte, poté pomocí alkoholu odmastěte a nechte uschnout (obr. 2).

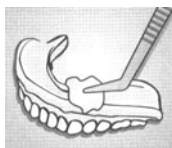


2. Aplikace adheziva

Na celý povrch, kde budete přidávat rebazi naneste vrstvu adheziva, nechte 1 min zaschnout (obr. 3). Pro správnou adhezi rebaze je třeba nanést adhezivum kontinuálně. Sliny, vlhkost či monomery kapaliny naruší bondování Mollosilu k protéze.




3. Míchání a aplikace

Míchejte stejný díl báze Mollosilu a katalyzátoru 30 vteřin. Aplikujte materiál nejdříve na bukalní a linguální okraje, poté rozetřete na dentální bázi v tloušťce min. 2 mm. Všechny části protézy, které jsou v kontaktu s gingivou musejí být pokryty materiálem. Usad'te protézu do pacientových úst a nechte jej zkousnout v normální okluzi. Pacient by měl během následujících cca 5 minut pohybovat ústy všemi možnými směry, aby došlo ke správnému zasednutí (obr. 4). Po 5-ti minutách je usednutí dokončeno a protézu je možno z pacientových úst vyjmout pro dokončení – odstranění přebytků a vyleštění.

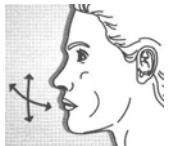


4. Odstranění přebytků a leštění

Pomocí skalpelu nebo ostrých nůžek odstraňte veškeré přebytky materiálu (obr. 5). Poté všechny zdrsňené oblasti zahlad'te vhodným brouskem (např. Molloplast Cutters, Pre-Polishers atd.) (obr. 6). Zdrsňené oblasti zaleštěte Lustrolem. Varnish a katalyzátor smíchejte důkladně spatulou na podložce v poměru 1:1. Poté štětečkem naneste a nechte 5 min zaschnout při pokojové teplotě (obr. 7).

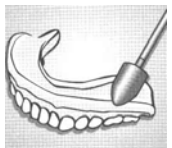

5. Doporučení pro denní péči o rebazovanou protézu

Pacient musí dbát, aby protéza byla čistá – čistit ji měkkým zubním kartáčkem několikrát denně s neutrálním mýdlem, poté opláchnout. Není vhodné protézu namáčet do čistící lázně na déle než 10 min.

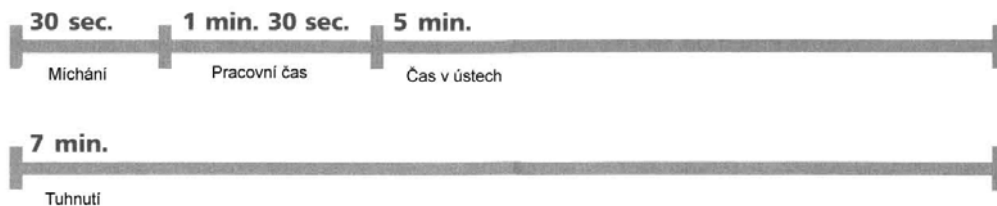

DŮLEŽITÉ PRACOVNÍ TIPY

- nezaměňujte uzávěry od jednotlivých tub
- absolutně pevný bond je dosažen jedině aplikací adheziva na zdrsňený povrch!
- adhezivum musí pokrývat celkovou kontaktní oblast
- pro správnou adhezi protézy, všechny povrchy v kontaktu s gingivou musejí být pokryty Mollosilem.

TECHNICKÁ DATA

- obsah: 2 x 50 ml (tuby)
2 x 30 ml (tuby)
- míchací poměr: 1:1
- barvy báze: tmavá červená
- barvy katalyzátoru: jasná modrá
- čas míchání: ručně cca 30 vteřin
- čas tuhnutí: cca 7 min
- čas v ústech: cca 5 min
- obnovitelnost z deformace: >99%
- lineární dimenzionální změna: < 0.3%
- aplikace při 23°C ± 2°C, 50 ± 5% relativní vlhkost

BALENÍ:

Mollosil – standardní balení 03005
(báze tuba 50ml, katalyzátor tuba 50ml, adhezivum lahvička 5ml, Lustrol lahvičky 2x6ml, 2 pipety)

Mollosil – startovací balení 02274
(báze tuba 30ml, katalyzátor tuba 30ml, adhezivum lahvička 5ml, Lustrol lahvičky 2x5ml)

Mollosil adhezivum 03007
(lahvička 5ml)

Lustrol 03008
lahvičky 2x6ml

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz