

## MUCOSOFT – Měkká rebazovací hmota A-silikonová

### OBECNÉ INFORMACE

MUCOSOFT je silikonový materiál pro přímé měkké podkládání snímacích náhrad. Je bez příchuti, bez zápachu a zabarvený v tělové barvě, aby splynul s odstínem existující plně či částečné základny zubní náhrady. Nelze použít s nylonovými flexibilními materiály, jako je např. Flexite, Valplast atd.

#### Hlavní indikace použití jsou:

1. Mucosoft je doporučen při retenčních změnách bezzubé čelisti, kdy tato skutečnost způsobuje pacientovi nepříjemný pocit
2. Kostnaté výstupky z bezzubých okrajů vytvářejí otlaky a podráždění tkáně
3. Podpora náhrady tkání je měkká a tvrdá tkáň způsobuje pacientovi nepříjemný pocit

### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před započítím zákroku se přesvědčte, že měkké tkáně jsou zdravé a bez jakéhokoliv podráždění.
2. Před umístěním postupně vydesinfikujte, omyjte a vysušte protézu. Brouskem odstraňte nejméně 1 mm suché protézy ze strany dásně. Pro zachování potřebného prostoru a abyste zamezili debondování či poškození materiálu, je zde třeba udělat min. 1 mm mezeru. Optimální je 1 – 3 mm.
3. Okraj náhrady by měl být taktéž upraven a zkosen ta, aby minimálně 2 mm Mucosoftu přesahovaly přes okraj náhrady.
4. Naneste Mucosoft Bonding Liner do misky. Pomocí jednorázového kartáčku aplikujte tenkou vrstvu na připravený a suchý povrch náhrady. Nechejte na zaschnout na vzduchu cca 2 minuty. Neaplikujte na dásně! S Bonding Liner pracujte extra-orálně a vždy ve větraných prostorách.
5. Odstraňte vršek z kartridge Mucosoftu. Před připevněním míchací špičky naneste cca 5 mm báze a katalyzátoru na misku, abyste zajistili, že vytékající materiál je čistý a plynně tekutý. Připevněte míchací špičku a vytlačte automaticky smíchanou směs silikonu Mucosoft před celou oblast, kde je třeba nanést adhezivum. Abyste minimalizovali výskyt vzduchových bublinek, doporučujeme započít nanášení na posteriorním okraji a vyplnit náhradu postupným překrýváním dopředu a zpět, jako když sečete trávník. Používejte malé obloučky a následujte obloučky náhrady (viz obrázek). V případě potřeby si můžete pomoci spatulou, abyste rozetřeli silikon po celém povrchu. Dbejte na to, aby silikonem byli pokryty všechny adhezivně ošetřené plochy. Zamezte kontaminaci latexem z gumových rukavic, jež se může porušit tuhnutí silikonu. Nikdy nenahrazujte silikonový otiskovací materiál pro Mucosoft Soft Reline Silicone. Mezi jednotlivými aplikacemi nechejte na kartridži míchací špičku jako uzávěr.
6. Před zatuhnutím nechejte pacienta vypláchnout ústa, aby došlo k odstranění slin. Během aplikace nasazujte náhradu z posterior do anterior posuvným pohybem, abyste zamezili vzniku vzduchových bublinek a přímý spád materiálu do pacientova hrdla. Přesvědčte se, že je vše správně nasazeno a odstraňte přebytečný materiál.
7. Usadte pacienta do centrické vertikály a masírujte tváře, aby došlo ke správnému usazení. Pacient by měl zůstat v centrické okluzi minimálně po dobu tuhnutí silikonu (5 min). Během této doby je třeba odstranit přebytečný materiál. Stále však kontrolujte slinivost pacienta. Po odsátí vždy vraťte pacienta do centrické okluze.
8. Sejměte náhradu a opatrně odstraňte všechny silikonové přebytky nůžkami, ostrým skalpelem, žiletkou či vhodným brouskem. Zamezte tomu, aby na protéze zůstal jakýkoliv přebytečný silikon. Dbejte na to, aby nedošlo k přílišnému zkrácení! Také zamezte poškození okrajů nožem.
9. Smíchejte přesně díl A a díly B Mucosoft Glaze a aplikujte směs na místa náhrady, kde se nedotýká dásně, jednorázovým kartáčkem. Nechejte cca 2 – 3 minuty zaschnout při pokojové teplotě a poté minimálně 1 min v horké vodě. Jedině takto dosáhnete hladkého a vyleštěného povrchu. Nikdy neaplikujte Mucosoft Glaze na místa, která se dotýkají dásně. Dbejte na úplné zaschnutí směsi!

### KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případě jedinců s alergickými reakcemi na silikonové produkty. Mucosoft Glaze není určen k leštění či vyhlazení ploch. Tyto plochy nejdříve upravte příslušným postupem.

### UPOZORNĚNÍ

Neslouží pro vnitřní použití. Zabraňte polknutí materiálu. Materiál je netoxický, ale i přesto může být nebezpečný. Zabraňte kontaktu s očima. V případě zásahu očí vyhledejte lékařské ošetření. Jestliže dojde k projevům alergické reakce, přestaňte používat Mucosoft. Nasáknutím bělicí pasty může dojít k zabarvení hmoty. Pacienta je třeba upozornit na přísnou hygienu náhrady, aby nedošlo ke vzniku infekce. Jestliže dojde ke zjevnému praskání, úbytku, drolení či jinému poškození, je třeba zastavit používání náhrady a co nejdříve navštívit svého zubního lékaře, který provede opravu, aby nedošlo k odlamování a polikání částecek silikonu.

### **OPRAVY**

Silikonový materiál nepřilne jeden ke druhému! V případě opravy je třeba, aby byl vyměněna celá hmota.

### **BALENÍ**

1 x 50 ml standardní (1:1) kartridge + míchací špičky

1 x 15 ml bonding liner + dispenzní pipety

1 x 6 ml A + 6 ml B glazura (12 ml)

Jednouúčelové aplikační štětečky pro bondování a/nebo glazurování

### **SKLADOVÁNÍ**

Materiál skladujte na chladném a dobře větraném místě v patřičné vzdálenosti od teplotních zdrojů. V případě nedostatečné ventilace používejte ochranou roušku.

### **ZÁRUKA**

Společnost Parkell se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost Parkell nepřejímá odpovědnost za poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Před prvním použitím je důležité si podrobně přečíst návod. V případě nejasností kontaktujte dodavatele.

### **AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:**

**Hu-Fa Dental**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)