

**R 4**

Roztok pro endodontickou desinfekci

*Složení:*

Chlorhexidine diglukonát (20% roztok)	0.2 g
Denaturovaný etyl alkohol	40.0 g
Přísady	100 g

*Indikace:*

Endodontická desinfekce

*Vlastnosti:*

R4 je chlorhexidin diglukonátový roztok, určený pro desinfekci kořenových kanálků díky svému specifickému efektu na anaerobní bakterie flory kořenového kanálku a endoperiodontického zranění.

*Kontraindikace:*

Zvýšená citlivost.

*Návod k použití:*

Po reamování a vypláchnutí kořenového kanálku, kápněte pomocí pipety R4 dovnitř. Umístěte bavlněnou peletku. Vyplňte dočasným cementem.

*Upozornění:*

Produkt je vysoce hořlavý. Lahvičku skladujte pevně uzavřenou. Skladujte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vznícení. Nekouřit.

*Balení:*

13 ml lahvička

*Skladování:*

Skladujte na tmavém místě v teplotě do 25°C. Nepoužívejte po vypršení expirace!

*Farmako-terapeutické zařazení:*

Dentální produkt pro profesní použití

*Výrobce:*

Septodont, Francie