

RAINBOW

Míchací paleta pro míchání a udržování vlhkosti zpracovávaného porcelánového prášku. Vlhkost je do 10ti místiček s porcelánovým práškem přiváděna pomocí kapilárových trubiček, a tak je jednoduše zamezeno jeho vyschnutí. Dvě kruhové místičky po stranách slouží pro uchovávání modelovacích tekutin či pigmentů.

Základnu míchací palety plňte vždy destilovanou vodou až do okamžiku, kdy je zakryta houba. Tuto tekutinu pravidelně doplňujte. Dbejte na to, abyste vždy použili pouze destilovanou vodu!

Houbu a paletu čistěte pravidelně vodou a kontrolujte, zda nedošlo k ucpaní kapiláry, v tomto případě kapiláru vyčistěte jehlou.

Pro lepší identifikaci prášku je možno víčko označit vodě-odolnou fixou.

OBSAH BALENÍ

- 1 ks míchací paleta
- houba
- nádobka

DOPORUČENÍ

Abyste mohli míchací paletu používat po velmi dlouhou dobu, je třeba dbát následujících doporučení:

- nádobku plňte pouze destilovanou vodou a do okamžiku, než je zakryta houba
- destilovanou vodu pravidelně doplňujte
- paletu a houbu pravidelně čistěte
- před prvním použitím houbu řádně promyjte pod horkou vodou

UPOZORNĚNÍ

V případě použití třibarevných pigmentů může během evaporace tekutiny dojít k naleptání plastického víčka. Nikdy neoplachujte víčko monomery či roztoky obsahující rozpouštědlo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní houby Nr. 91058-0002 – balení 10ks

ZÁRUKA

Míchací paleta Rainbow je velmi kvalitní produkt, proto je u každého výrobku garantována nejvyšší kvalita.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravská 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz