

React

Návod k použití

Příprava zubu

- Čištění
Zub, který budete bondovat řádně vyčistěte pomocí pemzy. Není možno používat prophy pastu obsahující olej nebo fluorid. Pasta může v zubu zanechat nečistoty, které naruší leptání. Zub kompletně omyjte dostatečným množstvím vody. Vysušte bezolejovým a suchým proudem vzduchu.
- Leptání
Leptadlo aplikujte pomocí bavlněné peletky nebo kartáčkem na celou bondovanou oblast. Je třeba aby bylo čerstvé leptadlo aplikováno řádně dabovací technikou. Nenanášejte leptadlo na sklovinu. Leptání je ukončeno po 30 vteřinách. U mléčného zubu je čas 120 vteřin. Dbejte na to, aby se leptadlo nedostalo do kontaktu k měkkou tkání.
- Opláchnutí a sušení
Zub řádně opláchněte dostatečným množstvím vody, aby bylo leptadlo zcela vymyto. Nenechávejte pacienta vypláchnout či kontaminovat ošetřené místo. Re-izolujte a kompletně vysušte pomocí bezolejového a zcela suchého proudu vzduchu. Ošetřená oblast by měla být kalná a ledově vyhlížející. Jestliže tomu tak není, opět aplikujte leptadlo po dobu 20 vteřin.

Bondování

- Na povrch každého naleptaného a vysušeného zubu, kde přijdou brekety, aplikujte tenkou vrstvu primeru. Stejně tak na spodní stranu báze každé brekety. Malé množství pasty se také aplikuje na bázi brekety.
- Breketu umístěte na zub a během 25 vteřin ji umístěte do požadované pozice, pevně stiskněte. Přebytné adhezivum je možno z okraje brekety snadno odstranit poté co je breketa na místě. Po 5 minutách je možno zasunout drát.

Snímání breket

- Brekety sejmete ligaturními kleštěmi. Jakýkoliv zbytek pečetidla odstraníte odstraňovačem zubního kamene.

Prevence a upozornění

- Nezpolymerovaný bondovací materiál může způsobit podráždění. Po práci si vždy umyjte ruce. Pro lepší ochranu je třeba používat ochranné pracovní pomůcky – rukavice a brýle.
- Zabraňte kontaktu leptadla s měkkou tkání.
- Bondovací materiál je určen k použití při pokojové teplotě.
- Živostnost je v případě správného zacházení 2 ½ roku.
- Kit je možno skladovat v lednici a tak prodloužit životnost na 4 roky.
- Nikdy neskladujte materiály v blízkosti produktů obsahujících eugenol. Nevystavujte je zvýšeným teplotám ani světlu.
- Dbejte na ochranu před kros-kontaminací pasty a primeru. Přítomnost jiného materiálu způsobuje tvrdnutí.
- Nikdy opětovně nepoužívejte jednorázovu spatulu, může být zdrojem kontaminace.
- Jestliže s materiálem nepracujete, řádně jej uzavírejte.
- Leptadlo obsahuje 37% kyseliny fosforečné, která dráždí pokožku a oči. V případě kontaktu, vypláchněte vodou. V případě zasažení očí vyhledejte ihned lékařské ošetření.