

## STERILIZAČNÍ SÁČKY – jednorázové sterilizační sáčky (v roli nebo samouzavíratelné)

### Složení

Polyamid + přídavné směsi

### Návod k použití

1. Vyberte správnou velikost sáčku. Musí být o 2 cm delší než jsou sterilizované nástroje, také musí dostatečně široký.
2. Vezměte sáček, vložte nástroj a co nejvíce vytlačte vzduch
3. a. role:  
Okraj sáčku vložte do svářečky na 2 vteřiny. Nepoužívejte příliš velký tlak, aby nedošlo k poškození sváru. Nastavte hodnotu na číslo 3.  
b. samouzavíratelné sáčky:  
na sáčku odstraňte papírovou ochranou pásku, přehněte sáček podélně dle linky a slepte.
4. Zabalené instrumenty jsou viditelné, hledáte-li určitý, není třeba je vytahovat. Je pouze třeba dodržovat následující kroky:
  - a. Nástroje nikdy neukládejte na dno sterilizátoru
  - b. Zamezte kontaktu se stěnami
  - c. V horkovzdušném sterilizátoru nepokládejte nástroje na kovové tácky, používejte např. žáruvzdorné skleněné tácky.
5. Při sterilizaci postupujte dle instrukcí výrobce, zvláště dbejte na dodržování teploty, která nesmí být v žádném případě překročena  
200°C - sáčky pro horkovzdušném sterilizátoru  
140°C – sáčky pro parní autokláv

Doporučené cykly:

- Parní autokláv 134°C – ne méně než 3 min + 10 min sušení
- Horkovzdušná sterilizace 160°C – ne méně než 120 min  
170°C – ne méně než 60 min  
180°C – ne méně než 30 min

Sterilizátor je třeba pravidelně podrobovat technickým kontrolám, aby byl zaručen jeho správný chod.

6. Sáčky nechejte po sterilizaci vychladnout (5 – 10 min), během této doby jsou dveře sterilizátoru otevřeny. Nyní dojde ke změně barevného indikátoru z růžové na hnědou. Tím je zaručeno dokončení sterilizačního cyklu. Účinnost sterilizace je možno dokázat při testu.
7. Po ukončení sušení se v sáčcích může objevit kondenzovaná kapalina. Toto je normální jev a během 10-ti minut vše bude v pořádku.

### Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě (15 – 30°C), chraňte před světlem.

### Balení:

- Nr. 1: 100ks sáčků – 5x24cm  
Nr. 2: 100ks sáčků – 7.5x25cm  
Nr. 3: 100ks sáčků – 10x25cm  
Nr. 4: 100ks sáčků – 15x28cm

Při objednávání uveďte, zda žádáte balení v roli či samouzavíratelné sáčky. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost v případě chybného používání Vašeho sterilizátoru či nedodržení maximální teploty uvedené na jednotlivých sáčcích.

**AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:**

**Hu-Fa Dental**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)