

TEMP BOND NE DOČASNÝ CEMENTAČNÍ MATERIÁL BEZ EUGENOLU

APLIKACE

Temp Bond NE je neugenolový dočasný cementační materiál pro cementace dočasných oprav. Temp Bond NE neovlivňuje nastavení permanentní rezinové cementace či změkčeným akrylátovým dočasným opravám. Temp Bond NE je určen pro pacienty, kteří mají alergii na eugenol.

PŘÍPRAVA:

1. Vytlačte potřebné množství Temp Bondu NE a akcelerátoru na míchací podložku.
2. Vysušte opravovaný zub a povrch místa opravy.
3. Vzniklou pastu míchejte přibližně 30 vteřin.
4. Na vnitřní plochy opravovaného místa naneste tenkou vrstvu Temp Bondu NE (směs má čas tuhnutí cca 4 minuty při teplotě 23°C a relativní vlhkosti 50%).
5. Pevně zasaďte opravenou část.
6. Jakmile Temp Bond zaschne (přibližně po 6-ti minutách od počátku míchání či po 4 minutách od aplikace v ústech), odstraňte veškeré přebytky.
7. Ideální pracovní podmínky jsou 23°C a 50% relativní vlhkost.
8. Po použití tuby s materiálem dobře uzavřete.

TEMP BOND MODIFIER

Temp Bond Modifier mění tvrdost cementační směsi dle přidaného množství.

1. Vytlačte potřebné množství Temp Bondu NE akcelerátoru a Temp Bondu NE na míchací podložku.
2. Na okraj podložky si naneste malé množství Temp Bond NE Modifíeru (zhruba 25% množství akcelerátoru a základního materiálu).
3. Množství přidaného modifíeru změní tvrdost cementační směsi. Nemění však dobu tuhnutí.
4. Pokračujte dále viz Příprava - bod 3.

ČAS TUHNUTÍ

Čas tuhnutí na míchací podložce při 23°C a relativní vlhkosti 50% je minimálně 3 ½ minuty. Změnou teploty a vlhkosti dosáhnete změnu tuhnutí směsi.

SKLADOVÁNÍ

Doporučené skladovací podmínky jsou 10 – 25°C a 50% relativní vlhkost. Materiál by se měl použít při pokojové teplotě (18 – 24°C) a 50% relativní vlhkosti. Zrychlení tuhnutí docílíte zvýšením teploty a relativní vlhkosti.

AKTIVNÍ SLOŽENÍ

50 g základního materiálu obsahuje:

44 g oxidu zinku

15 g akcelerátoru obsahuje:

14 g polyorganických kyselin

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy žádné kontraindikace

ZÁRUKA

Společnost Kerr se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost Kerr nepřijímá odpovědnost za poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Před prvním použitím je důležité si podrobně přečíst návod. V případě nejasností kontaktujte dodavatele.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz