

## Ultradent - Astringedent roztok

UP- 0111 30 ml

UP - 0121 60 ml

- Pro kontrolu hemostázi.
- Okamžitá koagulace.
- Velice šetrný k měkké tkáni.

### Popis:

15 % Síran železitý  $Fe_2(SO_4)_3$ . Doposud nedosažitelná hemostáza při současné šetrnosti vůči živým tkáním. Při aplikaci Astringedentu (popis viz **Astringedent Dento-Infusor** soubor) dochází k okamžitému a dlouho trvajícimu zastavení krvácení.

### Indikace:

Chcete-li dosáhnout při použití Astringedentu suchého čistého operačního pole musíte postupovat tak, jak bylo popsáno v návodu pro **Astringedent soubor** - to znamená bohatě ostříkovat celý prostor vodou. Při tomto způsobu použití dosáhnete otisků vynikající kvality.

### Postup:

Hemostáza : Použití **Dento-Infusor** jehly zvyšuje účinnost **Astringedentu** několikanásobně (zapečetění kapilár), čisté nekrvácující prostory pak umožňují dobré zatečení korekturní otiskovací hmoty.

Restaurativní zubní lékařství : **Astringedent** se používá také bez Dento-Infusor jehel všude tam, kde je potřeba otevřít marginální prostory pro následovnou restauraci nebo

### Obsah:

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| UP 0111 | 30 ml <b>Astringedent</b> roztok |
| UP 0121 | 60 ml <b>Astringedent</b> roztok |

Exspirační doba 48 měsíců

Distribuce v ČR:

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205