

## **ChlorCid® a ChlorCid® V**

Roztok chlornanu sodného

### **Popis:**

ChlorCid® je vodný roztok chlornanu sodného v koncentraci nepřekračující 3,0%. Tam, kde je žádoucí aplikace pod kontrolou, můžete použít viskóznější ChlorCid V ve stejné koncentraci.

### **Indikace:**

ChlorCid se používá na vyplachování, čištění a dezinfekci preparovaného kořenového kanálku a/nebo preparovaných zubních povrchů, například intrakoronální preparace nebo preparace na korunku.

### **Návod k manipulaci před vlastním použitím:**

1. Sejměte uzávěr velké 30ml stříkačky IndiSpense®.
2. Na otvor ve stříkačce IndiSpense nasaďte označenou malou stříkačku pro jednotlivou dávku tak, že uzávěr jednotkové stříkačky jemně nasadíte na konvexní konec IndiSpense, tak, jak ukazuje obrázek č. 1.
3. Píst stříkačky IndiSpense stiskněte dlaní (obr. 2) a naplňte jednotkovou stříkačku požadovaným množstvím. Píst jednotkové stříkačky fixujte druhou rukou, aby se předešlo nechtěnému vystříknutí materiálu. Píst jednotkové stříkačky pomalu vytahujte, tím napomůžete jejímu plnění. Obsah jednotkové stříkačky nevytlačujte zpět do IndiSpense. Použitá jednotková stříkačka by se z důvodu ochrany před kontaminací neměla na IndiSpense znovu nasazovat. ChlorCid si dále vytlačte z IndiSpense do misky a do jednotkové stříkačky si jej pak po sejmutí uzávěru natahujte. Kanylku znovu nasaďte a aplikujte podle potřeby.

### *Obrázky 1 a 2*

*Na stříkačku IndiSpense se pevně nasadí 5 ml (zde) nebo jednotková 1,2 ml stříkačka. Píst jednotkové stříkačky chytíme nedominantní rukou a stiskneme píst IndiSpense a jednotkovou stříkačku naplníme požadovaným množstvím.*

4. Na jednotkovou stříkačku pevně nasaďte konylku NaviTip™ nebo Endo-Eze® Irrigator.
5. Stříkačku držte spíše s pístem v dlani než konvenčním způsobem s palcem na pístu.

### **Aplikace:**

1. Po nanesení chelatačního a lubrikačního přípravku na bázi EDTA File-Eze® do ústí kanálku jej vypláchněte ChlorCidem (obr. 3). ChlorCid/ChlorCid V aplikujte opakovaně podle potřeby, aby se kanálek efektivně vyčistil a navlhčil.
2. Opakujte podle potřeby: Šumění přestane, až budou všechny zbytky File-Eze úplně z kanálku odstraněny.
3. Těsně před sušením před plněním kanálek opláchněte větším množstvím běžného chlornanu sodného, sterilní vody nebo anestetika.

### *Obrázek 3*

*Po vypracování kanálku do něj z Vámi naplněné stříkačky s miniaturní kanylkou velikosti 27 Endo-Eze Irrigator naneste dezinfekční roztok chlornanu sodného ChlorCid/ChlorCid V.*

### **Upozornění:**

1. Nedopusťte požití větších objemů roztoku. Při preparaci a čištění kanálku se má nasazovat kofferdam (doporučujeme DermaDam®). Přebytečný materiál odsajte savkou.

2. Vyvarujte se nanášení do nebo v blízkosti očí. Pokud se to stane, opláchněte vodou.
3. ChlorCid nevytlačujte na barevné tkaniny, protože se mohou odbarvit. Nevytlačujte a nenechávejte na jakémkoliv barevném povrchu jako například stolek na nástroje. Při náhodném kontaktu ihned opláchněte.
4. Nepoužívejte u pacientů s prokázanou alergií na chlornan sodný.
5. Před sušením a plněním nezapomeňte opláchnout ChlorCid V, jak je popsáno v kroku 3.
6. Koncovky NaviTip nepřetlačujte přes apex ani tam neaplikujte ChlorCid. Před aplikací NaviTip mírně povytáhněte, aby se bylo jasné, že se mezi koncem a stěnou kanálku nachází volný prostor.

Stříkačky Ultradent mají na straně vyraženo datum expirace, které sestává z jednoho písmene a třech číslic.

Písmeno je označení sady pro výrobce a tři čísla značí datum.

První dvě číslice značí měsíc a třetí číslice je poslední číslicí v letopočtu.

**Minimální trvanlivost: 18 měsíců. Skladujte při pokojové teplotě.**

Uchovejte mimo dosah dětí.

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205  
e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)