

Diamond Polish

Leštící pasta s hrubostí 1.0 µm a 0,5 µm

Popis a indikace:

Ultradent® Diamond Polish se dodává ve dvou hrubostech: 1.0 µm a 0,5 µm. Obě obsahují diamantové částice ve vodní bázi. Diamond Polish se používá k naprosto dokonalému leštění keramických náhrad nebo kompozitních výplní. Vysokého lesku dosáhnete při použití intraorálně i extraorálně.

Postup:

- I. Leštění keramiky
 1. Všechny plošky výplně upravte špičkami, kalíšky nebo kotoučky Jiffy® (obr. 1).
 2. Ze stříkačky sejměte uzávěr. Našroubujte na ni jednorázovou kanylku Mini.
 3. Nejvhodnější je držet stříkačku v dlani ruky (obr. 2) než konvenčním způsobem s palcem na pístu.
 4. Plstěným kotoučem naneste malé množství leštící pasty (obr. 3). V konečných fázích leštění zvyšte otáčky v násadci a nastavte velký průtok vody ve spreji.
 5. Ke konečnému opláchnutí použijte silný vodní sprej.

- II. Leštění kompozitu
 1. Všechny plošky výplně upravte kalíšky, špičkami, disky, kotoučky Jiffy®, a abrazivními páskami.
 2. Diamond Polish naneste štětečkem z kozích chlupů Jiffy Goat Hair Brush.
 3. Plošku(y) opláchněte a osušte.
 4. Jako pěknou „glazuru“ naneste na závěr kompozitní sealer PermaSeal®.

Upozornění:

1. Z důvodů prevence kontaminace doporučujeme použít ochrannou vrstvu z krytů na stříkačky Ultradent® Syringe Covers utěsněné přípravkem Ultradent® Impulse Sealer.
2. Kanylky jsou na jedno použití.

Legenda k symbolům:

Použít do data:

Nepoužívat znovu:

Objednáací číslo:

Viz návod k použití:

Číslo šarže:

Doporučená teplota při skladování: 18 - 30°C

Trvanlivost: 36 měsíců. Skladovat při pokojové teplotě.

Stříkačky Ultradent mají po stranách vytištěno datum expirace, které se skládá z jednoho písmena a tří číslic.

Písmeno označuje sérii pro účely výroby a tři číslice jsou vlastní datum expirace. První dvě číslice značí měsíc a třetí číslice je poslední číslicí letopočtu.

Obrázky:

1. *Výplň upravte jemnými brousky, kotoučky, špičkami Jiffy® a/nebo abrazivními páskami.*
2. *Stříkačku je nejlepší držet v dlani.*
3. *Předčasnému setření leštící pasty předejdete nízkými otáčkami v pomalém násadci bez vody.*