

EDTA roztok 18%

Popis a indikace:

Ultradent EDTA je 18% bezbarvý, nízkoviskózní vodný roztok chelatační látky. Obsahuje surfaktant, který podporuje lepší čištění. Při preparaci kořenového kanálku napomáhá dekalifikací dentinu a odstraňuje sprašovou vrstvu (smear layer). Doporučujeme EDTA používat k poslednímu výplachu kanálku před jeho zaplněním EndoREZ.

Postup:

Příprava:

A. Aplikace ze systému IndiSpense®:

1. Prázdná 1,2 ml nebo 5 ml stříkačka se lehkým otočením uzávěru našroubuje na mužský konec velké stříkačky IndiSpense šetřící materiál tak, jak je to na obrázku 1.
2. Stříkačku IndiSpense uchopte do dlaně (obr. 2) a stlačte její píst, při tom zároveň druhou rukou přidržujte jednotkovou stříkačku. Píst jednotkové stříkačky jemně popotáhněte, aby se usnadnilo její plnění. Obsah jednotkové stříkačky nepřetlačujte zpět do stříkačky IndiSpense. Z hygienických důvodů by se použitá jednotková stříkačka neměla znovu nasazovat na stříkačku IndiSpense.
3. Uzávěr stříkačky odšroubujte. Pevně na ni našroubujte kanylku NaviFX™ nebo NaviTip™. Na kanylku NaviFX nasadte gumovou zarážku nejméně 2 mm od konce kořene tak, jak to je na obr. 3.

Postup:

1. Přesvědčte se, zda je kanylka NaviFX v kanálku volná a že je minimálně 2 mm od konce kanálku. Kanylkou NaviFX jemně naneste EDTA. Kartáčkem roztok roztírejte vertikálními pohyby tak, aby se stěny kanálku očistily EDTA tak, jak to je vidět na obr. 4. Nevytlačujte EDTA v případě, že je konec kanylky na samém konci kanálku nebo pokud těsně naléhá na stěny kanálku.
2. Poslední výplach proveďte čistou vodou bez obsahu bakterií, prostým roztokem EDTA nebo lokálním anestetikem. Většina roztoku EDTA nebo jiných výplachů se rychle a účinně odstraní pomocí adaptéru Luer Vacuum na savce spolu s kanylkou Capillary nebo 10mm Micro Capillary.
3. Na konečné dosušení kanálku pak při vysoušení odsáním dle kroku 2 výše stačí jeden nebo dva papírové čepy.
4. Vyzkoušejte hlavní (master) čep a kanálek zaplňte. Doporučujeme zaplňovat metodou ADO™ (apically delivered obturation - plnění směrem od apexu) hydrofilním sealerem EndoREZ™ a gutaperčou.

Upozornění:

1. Při endodoncii vždy používejte kofferdam. Je nutné předejít požití roztoku EDTA.
2. Nedopusťte, aby se roztok dostal do očí nebo aby byl ponechán na měkkých tkáních po delší dobu.
3. Nepřetlačujte kanylku ani EDTA přes apex.
4. EDTA z kanylky nevytlačujte, je-li na konci kořenového kanálku nebo pokud kanylka těsně přiléhá na stěny kanálku. To může vést k násilnému přetlačení roztoků přes apex.
5. Tento produkt nepoužívejte u pacientů s prokázanou citlivostí na EDTA.
6. Kanylky a aplikační stříkačky jsou jednorázové a určené k jednomu použití.

Obrázky:

1 a 2: Jednotkovou stříkačku o obsahu 1,2 ml pevně našroubujte na stříkačku IndiSpense. Stiskněte píst IndiSpense, druhou rukou přidržujte píst jednotkové stříkačky, a naplňte jednotkovou stříkačku požadovaným množstvím.

3 Odměřte kanylku NaviFX tak, aby byla 2 mm od apexu a aby byla v kanálku volná.

4 Do kanálku vytlačte EDTA. Kanylkou se štětečkem roztok vertikálními pohyby rozetřete. Kanálek důkladně vypláchněte prostým roztokem EDTA, čistou vodou bez bakterií nebo lokálním anestetikem.

Trvanlivost 36 měsíců.

Skladujte při pokojové teplotě.

Stříkačky Ultradent mají po straně vyražené datum expirace, které se skládá z jednoho písmene a tří číslic.

Písmeno je označení série, které se používá ve výrobě, a tři číslice jsou datum expirace.

První dvě číslice jsou měsíc a třetí číslice je poslední číslice letopočtu.

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205