

FILE-EZE®

Chelatační přípravek na bázi EDTA & lubrikant kořenového kanálku

Popis:

File-Eze® je dentinový chelatační přípravek s 19% EDTA ve vodném a vodě rozpustném roztoku s lubrikačním základem.

Indikace:

File-Eze používejte jako pomoc při vypracování a odstraňování zbytků z kořenových kanálků.

Přípravné kroky:

A. Aplikace pomocí systému IndiSpense®:

1. Předem označená jednotková stříkačka File-Eze se připojí na konec velké, bezodpadové stříkačky našroubováním uzávěru jednotkové stříkačky na mužskou koncovku IndiSpense, jak ukazuje obrázek 1.
2. Píst IndiSpense se stlačí dlaní (obrázek 2) a současně se jednotková stříkačka fixuje nedominantní rukou. Lehce povytahujte píst jednotkové stříkačky k usnadnění naplnění. Nevytlačujte obsah jednotkové stříkačky zpět do stříkačky IndiSpense. Aby se předešlo kontaminaci, nemá se použitá stříkačka znovu nasazovat na stříkačku IndiSpense.
3. Na jednotkovou stříkačku nasad'te uzávěr, pokud ji nebudete ihned používat, nebo nasad'te koncovku Mini tip a vložte do obalu TipSoc™ od Ultradentu.
4. Když je vše připraveno k použití, pokračujte podle následujících kroků 1 – 3.

B. Aplikace z již naplněných 1,2 ml stříkaček:

1. Ze stříkačky sejměte uzávěr.
2. Na stříkačku pevně našroubujte koncovku Mini tip nebo Endo-Eze® Irrigator. Nejlépe budete se stříkačkou manipulovat, pokud ji budete držet pístem v dlaní, jak je ukázáno na obrázku 3 namísto konvenčního způsobu s palcem na pístu.

Postup:

1. Koncovka Endo-Eze Irrigator tip nebo Endo-Eze tip velikosti 31 se může použít pro aplikaci File-Eze přímo do vchodu do kořenového kanálku., jak je ukázáno na obrázku 4. Když je obtížné najít kanálek, sondujte jej čepem nebo kořenovým nástrojem dříve, než vstříknete File-Eze do dřeňové dutiny nebo než do něj namočíte kořenový nástroj. Udržuje se pod kontrolou zraku.
2. Jakmile se nalezne vchod do kořenového kanálku, vtlačte File-Eze skrz koncovku do kanálku. Může se také nanést malé množství File-Eze přímo na nástroj, jak ukazuje obrázek 5, nebo použijte koncovky Endo-Eze pro přístup do hloubky kanálku.
3. File-Eze se nanáší a vyplachuje z kanálku jako u jiných přípravků do kořenových kanálků, dobře se k tomu hodí hypochloritový roztok ChlorCid®. Když se ChlorCid setká se zbytky File-Eze, vzniklá šumivá směs má přídavný čistící účinek, což pomůže z kanálku odstranit přebytečný materiál.

Upozornění:

1. Nanášíte jen do ústí kanálku. Nepřetlačujte materiál přes foramen apicale.
2. Koncovky jsou na jednu použití.
3. Stříkačky po jednotlivých pacientech čistěte a dezinfikujte. Velmi doporučujeme použít sáčky na stříkačky Ultradent® Syringe Covers zapečetěné přípravkem Ultradent® Impulse Sealer jako ochrannou bariéru k prevenci kontaminace.

Federální zákony USA omezují tento výrobek jen pro profesionální použití.

Odstraňte z dosahu dětí.

Pro okamžitou doobjednávku a/nebo kompletní popis výrobků Ultradentu se obraťte na katalog Ultradentu nebo zavolejte bezplatně (v USA): 1 800 552 5512

Mimo USA volejte +1 801 572 4200

Obrázky:

1&2 Jednotková stříkačka se pevně našroubuje na stříkačku IndiSpense. Za současného fixování pístu jednotkové stříkačky nedominantní rukou stlačujte píst IndiSpense a naplňte jednotkovou stříkačku požadovaným množstvím.

3 Pro nejvýhodnější kontrolu držte píst v dlani.

4 File-Eze se nanáší poté, co je koncovka zavedená do jeho ústí. Viditelnost není narušena.

5 Pokud chcete, File-Eze se může nanést přímo na nástroj.

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205