

Flor-Opal Varnish

Flor-Opal Varnish je směs 5% fluoridu sodného v pryskyřičné bázi, příjemné chuti (žvýkačka a máta), pro aplikaci na sklovinu a exponovaný dentin, jako účinná fluoridová léčba včetně snížení přecitlivělosti s mechanickou a chemickou okluzí dentinových tubulů. Flor-Opal Varnish se dodává v 0.5ml stříkačkách, čímž překonává hlavní problém tkvící ve fluoridových gelech – separaci fluoridu od pryskyřičného nosiče. Unikátní stříkačkový míchací systém zajišťuje konzistentní rozptyl fluoridu v pryskyřici a stříkačka s kanylou napomáhá přesné a snadné aplikaci.

1 ml Flor-Opal Varnish obsahuje 50 mg fluoridu sodného v suspenzi alkoholu s přírodní pryskyřicí. Varnish velmi dobře přilíná na suché povrchy zubů. Při kontaktu s vlhkostí Flor-Opal Varnish tvrdne a odolává rozpustnosti slinami, zatímco dochází k uvolňování fluoridových ionů.

Pracovní postup:

1. Pro využití všech výhod Flor-Opal Varnish, není třeba provádět dentální profylaxi, ale doporučujeme provést řádné vyčištění zubů.
2. Uchopte stříkačky oběma rukama mezi ukazováček a prostředníček. Aby došlo ke správnému smíchání přetlačte materiál z bílé stříkačky do čiré, 5x tam a zpět. Takto dojde k rozmíchání obsahu a tím je zajištěna správná suspenze složek. Do bílé aplikační stříkačky natlačte Flor-Opal Varnish. Na stříkačku pevně našroubujte kanylu FX Flex. Pro pohodlnější aplikaci je možné kanylu ohnout až do úhlu 90°. (je-li kanyla příliš ohnutá, může dojít ke snížení protékavosti).
3. Před aplikací vysušte zuby pomocí bavlněného tamponu, gázového čtverečku nebo vzduchem. Vytlačte malou kapku laku z kanyly FX Flex. Pomocí kartáčku na kanyle vytvořte na zubu tenkou, jednodílnou vrstvu. Jemně přetáhněte ret přes zuby, aby došlo ke správnému kontaktu zubů se slinami.
4. Varnish tuhne v okamžiku kontaktu se slinami a zůstává na místě aplikace po dobu několik dní. Upozorněte pacienta, aby si 4-6 hodin po aplikaci nečistil zuby a nejedl tvrdé potraviny.
5. Čím déle je varnish v kontaktu se zubem, tím je jeho účinnost vyšší. V případě extrémně přecitlivělých zubů je třeba pacienta pozvat na opakovanou aplikaci.

Upozornění:

1. Neaplikujte u pacientů s vředovitou gingivitidou či stomatitidou.
2. Ve stejný den nepoužívejte jinou fluoridovou léčbu. Orální fluoridové tablety nepoužívejte několik dní.
3. Nepoužívejte u pacientů se známou citlivostí na některou ze složek, včetně kalafuny a/nebo přírodní pryskyřice.
4. V ojedinělých případech se můžete setkat s oteklými způsobenými fluoridovým lakem, zvláště pro extenzivní léčbě. U astmatických dětí byla zaznamenána občasná dýchavičnost.
5. U pacientů s citlivým žaludkem je možno pozorovat občasnou nevolnost. Jakmile si bude pacient na nevolnost stěžovat, důkladným vyčištěním kartáčkem lak odstraňte ze zubů.
6. Stříkačku a kanylu po aplikaci znehodnoťte.