

Flor-Opal[®]

Fluoridový gel
s nepřetržitým
uvolňováním fluoridů

Popis:

Flor-Opal[®] je unikátní, vysoce viskózní, lepkavý gel s nepřetržitým uvolňováním fluoridů, obsahující 0,5% fluoridových iontů.

Je čirý, téměř bez chuti, s pH ~6.5.

Indikace:

Flor-Opal se používá vždy, když je požadována lokální aplikace fluoridu do nosiče zhotoveného pacientovi na míru (tj. při prevenci kořenových kazů, periodontálním ošetření, po bělení zubů, citlivosti krčků).

Postup:

1. Přečtěte si návod a ujistěte se, že mu rozumíte, dříve než výrobek předepíšete nebo aplikujete pacientům.
2. Zhotovte individuální nosič pacientovi na míru - viz laboratorní návod (str. 2). Oblasti citlivosti by měly být na odlitku/ modelu označeny. Jestliže pacient již má individuální nosič na bělení, instruujte jej, aby aplikoval Flor – Opal stejným způsobem jako bělicí gel.

Poznámka: Nosiče zhotovené pouze pro aplikaci Flor-Opal mohou být vyrobeny bez přesného ostříhnutí gingiválních okrajů. Pro bělení gely Opalescence[®] by ale okraje nosičů měly být zastřiženy.

3. Flor-Opal je dodáván ve stříkačkách o objemu 1,2ml. Při nanesení na kompletní čelistní oblouk spotřebujete většinu náplně jedné stříkačky. Nosič naplňte gelem ze spodní strany okluzálních a incisálních ploch.
4. Doba a počet aplikací gelu v nosiči závisí na potřebách každého pacienta a rozhodnutí lékaře. Doporučená doba aplikace je obvykle 2 - 8 hodin. Doporučujeme gel aplikovat přes noc; gel v nosiči zůstává aktivní obvykle 8-10 hodin, protože v noci klesá svalová aktivita a produkce slin. Při aplikaci přes den zůstává gel obvykle účinný 4-6 hodin.
5. Nosič by měl být sundán v době jídla. Po sundání nosiče by si pacient měl očistit chrup zubním kartáčkem opláchnout vodou. NEPOLYKAT roztok během vyplachování. Po použití nosič umyjte a uschovejte v krabičce na nosiče. Pro každou aplikaci by měl být použit čerstvý gel.
6. Gel můžete před naplněním nosiče zahřát, předejete tak citlivosti na změnu teploty.



obr.1



obr.2

Návod k použití pro laboratoře:

1. Odlijte a upravte odlitek stejně jako pro standardní nosiče na bělení. Naneste vrstvu pryskyřice Ultradent[®] LC Block-Out Resin v tloušťce 0,5-1,0mm na čistý, suchý model.
2. Polymerujte LC Block-Out Resin cca 2 minuty v polymerační jednotce (peci). Můžete také použít intraorální polymerační lampu (cca 20-40 sekund/ zub). Setřete okysličenou inhibiční vrstvu.
3. Na vakuovém přístroji (Ultra-Form[®] or EconoForm[™]) nahřívejte fólii Sof-Tray[®], dokud se neprověsí asi 2,5 cm. Aktivujte vakuum a natvarujte změkklý plast přes model. Po vychladnutí model odstraňte.
4. Odstrihněte zbytky fólie tvarovacími nůžkami Ultra-Trim[™].
5. Odstrihněte přebytečný materiál nosiče. Vytvarujte nůžkami Ultra-Trim[™] okraje nosiče tak, aby nepřesahovaly na anatomické struktury (např. frenum ...).
6. Nasadte nosič zpět na model; zkontrolujte přesah. Jemně nahřejte plamenem okraje a vyhladte-celý kvadrant najednou (Blazer[®] Micro Torch).
7. Za tepla přitlačte pevně každý segment periferně k modelu na 3 sekundy navlhčeným prstem. Je-li oblast kratší než požadovaná délka, jemně nahřejte a natáhněte materiál do požadovaného místa. Pokud by došlo k přílišnému ztenčení, musí být vyroben nový nosič.

Upozornění:


1. Jestliže se vyskytne jakýkoli problém, pacient nepokračuje v léčbě a upozorní svého stomatologa.
2. Pacienti by neměli polykat větší množství gelu Flor-Opal. Přebytky gelu vytlačené z nosiče při nasazení a zbytky po sundání nosiče by měly být očištěny zubním kartáčkem a opláchnuty. NEPOLYKAT.
3. Po celou dobu uchovávejte mimo dosah tepla a slunečního světla. Flor-Opal by měl být skladován v pokojové teplotě.
4. Přípravek není určen pro těhotné ženy.

Flor-Opal®

NÁVOD PRO STOMATOLOGY A LABORATOŘE



Odlijte model z tvrdé sádry, odstraňte materiál z oblasti patra a jazyka.

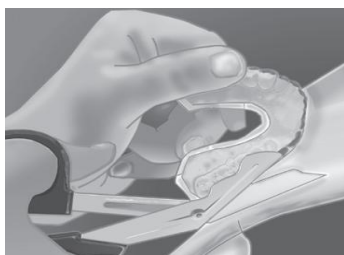

Pod tlakem natvarujte fólii Soft-Tray® 0,9 mm (0,035") na model. Po vychladnutí sundejte..



Pro ošetření citlivých zubních krčků naneste LC Block-Out Resin na gingivální okraje-vytvořte rezervoáry pro Flor Opal. Doporučujeme, aby nosič přesahoval 2- 3 mm na gingivu.

Obecná upozornění:

1. Pouze pro profesionální použití.
2. Před započatím ošetření si přečtěte návod, upozornění a bezpečnostní listy. Používejte pouze v souladu s návodem.
3. Chraňte před působením tepla a/ nebo slunečního světla.
4. Zabraňte kontaktu pokožky s pryskyřicemi.
6. Ujistěte se, že pacient netrpí / není mu známa alergie na materiály, kterými bude ošetřen.
7. Před intraorálním použitím zkontrolujte průtok materiálu kanylou mimo ústa pacienta.
8. Nikdy netlačte silou na píst stříkačky.
9. Očistěte a desinfikujte stříkačky mezi použitím na další pacienty

Flor-Opal®



NÁVOD PRO PACIENTA:

Naplňte gelem Váš nosič na bělení. Použijte cca ½ náplně stříkačky.



Očistěte zuby kartáčkem, pak nasadte nosič. Přizpůsobte boky nosiče zubům.



Odstraňte přebytky gelu čistým prstem nebo měkkým kartáčkem. Dvakrát vypláchněte, nepolykejte.



Očistěte nosič měkkým kartáčkem pod tekoucí studenou vodou. Uschovejte nosič v krabičce na nosiče.

Hu-Fa Dental, a.s. – výhradní dovozce produktů Ultradent pro ČR i SR

HU-FA Dental, a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, Česká republika, (tel: +420 577 926 226-9)
HU-FA Dental, s.r.o., Janka Kráľa 46, 022 01 Čadca, Slovenská republika, (tel: +421 41 433 10 16-17)