

# GISHY GOO!

**Výrobce:** Ultradent Inc.

**Popis:** Gishy Goo je ochucená thixotropní silikonová pryskyřice, která pevně drží brekety a dráty. Ihned po aplikaci zajistí úlevu podrážděných měkkých tkání, způsobenou ortodontickými aparáty.

- pět zajímavých veselých barev
- pevně drží brekety a dráty
- mnohem účinnější než vosk

Gishy Goo se dodává v duální stříkačce. Jedna je bílá s aktivátorem a druhá je barevná báze. Uzávěr na stříkačce předchází vysychání materiálu.

Pacient si ze stříkačky vytlačí materiál o velikosti hrášku. Pak ho důkladně promne v rukách a aplikuje na brekety nebo dráty v místě podráždění. Gishy Goo ztuhne do 2 minut a zůstane na místě až 12 hodin.

Vyrábí se v pěti různých veselých barvách se skvělou žvýkačkovou příchutí.

## **Klinické indikace:**

Silikon Gishy Goo zajišťuje mechanickou úlevu a ochrannou bariéru iritovaným měkkým tkáním způsobenou ortodontickými pomůckami.

Gishy Goo je ordinován lékařem k domácímu použití a pacient si ho sám snadno aplikuje. Jednoduchá aplikace umožní jeho použití i novým ortodontickým pacientům.

## **Technika použití:**

- Otevřete uzávěr pootočením vlevo (otevívá se pouze jedním směrem) a sejměte.
- Vytlačte malé množství Gishy Goo o velikosti hrášku na prst nebo pevnou podložku. Ujistěte se, že vytlačíte stejné množství z obou stříkaček bílé a barevné. Pokud se vytlačí materiál pouze jedné barvy, nepoužívejte ho, ale zkuste znova.
- Míchejte v ruce po dobu 10 sekund.
- Aplikujte smíchaný Gishy Goo na breketu v místě podráždění. Ztuhne do 2 minut.
- Po použití nasadte uzávěr zpět a otočením vpravo tubu pevně uzavřete.
- Gishy Goo může zůstat v místě až po dobu 12 hodin. Odstraňte Gishy Goo z breket před spaním, jídlem nebo pitím.

## **Frekvencované dotazy:**

### **1. Kolik let má být dítěti aby mohlo tento výrobek používat?**

Důrazně doporučujeme, aby děti do 12 let byli při aplikaci Gishy Goo pod dozorem rodičů, kteří jim s aplikací pomohou. Gishy Goo by může představovat riziko dušení pro děti mladší 4 let.

### **2. Je tento výrobek bezpečný při náhodné konzumaci?**

Výrobek nekonzumujte. Před jídlem, pitím, čištěním zubů a před spaním odstraňte Gishy Goo z breket, abyste předešli riziku dušení. Není třeba obav, pokud je spolknuto malé množství materiálu. Gishy Goo není toxický, ale je zde riziko dušení.

### **3. Jsou zde nějaká další upozornění při použití Gishy Goo?**

Nepoužívejte Gishy Goo pokud jste alergičtí na siloxan nebo silikon.

Vyhňte se potřísnění oděvů nebo textilií. Gishy Goo může vytvořit odolnou skvrnu. Skladujte Gishy Goo v pokojové teplotě. Nevystavujte ho vysokým teplotám blízko topení nebo v horkém autě. Může to ovlivnit tuhnutí materiálu. Při demonstraci Gishy Goo pacientovi, nepoužívejte latexové rukavice, protože silikon by ovlivnil chemické složení materiálu Gishy Goo a došlo by k velmi lepivé konzistenci. Při míchání v ruce použijte rukavice bez latexu při aplikaci v ordinaci. Pacienti by měli míchat a aplikovat Gishy Goo holýma rukama.

**4. Jak dlouho vydrží stříkačka Gishy Goo?**

Záleží na použití pacientem a jeho citlivosti na ortodontické pomůcky. Jedna stříkačka by měla vydržet přibližně 6 měsíců.

**5. Má Gishy Goo nějaký vliv na klinickou účinnost ortodontických prostředků?**

Ne, Gishy Goo nevytváří tření.

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.:  
577 926 226-9, fax: 577 926 205