

InterGuard™

Výrobce: Ultradent Products, Inc.

Popis a indikace: InterGuard je ochranná pomůcka používaná při stomatologickém ošetření. Používá se k ochraně sousedních zubů před poškozením při preparativním ošetření.

InterGuard lze autoklávovat a sterilizovat suchým teplem. Je vyroben z nerezavějící oceli a stočen na obou koncích, dobře sedí v případě velkých i malých interproximálních prostor. InterGuard se dodává ve dvou rozměrech:

- 4,0 mm pro malé anatomické korunky
- 5,5 mm pro velké anatomické korunky

Postup:

1. K ochraně pacienta před náhodným spolknutím InterGuardu použijte koferdam nebo upevněte dentální nití pomocí otvoru na straně InterGuardu. Ujistěte se, že nit visí minimálně na délku 7 palců (cca 18 cm) z úst.
2. Upravte zatočené konce prsty tak, abyste umožnili přesné usazení InterGuardu mezi zuby.
3. Umístěte InterGuard stočenými konci směrem k preparovanému zubu. (Fig. 1) Stočené konce udržují InterGuard přesně umístěný, zabraňují pohybu do stran a umožňují dostatečný přístup k preparované oblasti.
4. Při těsném proximálním kontaktu oddělte klínky nebo kroužkem.

Poznámka: Na konci preparace bude InterGuard vyjmut. Při tom přidržujte InterGuard prsty nebo stabilizujte během celé procedury upevňovacím kroužkem (v tomto případě otočte zakroucený konec směrem od zubu, jenž je preparován)

Upozornění:

1. Vždy izolujte ošetřovanou oblast koferdamem nebo podvažte InterGuard 7 palců (cca 18 cm) dlouhou dentální nití jako prevenci proti vdechnutí.
2. Pouze pro profesionální užití.