

NÁVOD K POUŽITÍ

Opalescence®
Oh!

Opalescence®
Oh!

Opalescence®
Oh!

Návod k použití pro pacienta:

1. Odstraňte kroutivým pohybem čepičku z kapsule Opalescence Oh!. Nestlačujte kapsuli během otevírání.



2. Naneste plynulou linku gelu dovnitř nosiče tak, aby po nasazení nosiče byl gel v kontaktu s přední plochou povrchu zubu. Linku gelu naneste do nosiče do jeho spodní poloviny směrem od horního okraje. Nosič nepřepĺňujte.
UPOZORNĚNÍ: Použijte pouze 1 kapsuli na 1 nosič.

3. Lehce přiadaptujte nosič k zubům. Odstraňte přebytečný gel z okrajů nosiče čistým prstem nebo měkkým kartáčkem. Noste Opalescence Oh! 10% 8-10 hodin přes noc, Opalescence Oh! 15% 4-6 hodin, Opalescence Oh! 20% 2- 4 hodiny a Opalescence Oh! 35% 30 minut.



4. Po uplynutí doporučené doby sundejte nosič a ihned umyjte zuby kartáčkem.
UPOZORNĚNÍ: Dvakrát vypláchněte, nepolykejte oplachovaný gel.



5. Očistěte nosič měkkým kartáčkem pod tekoucí studenou vodou. Nosič uchovávejte v krabičce na nosiče.



Preventivní opatření při bělení:

1. K bělení zubů nepoužívejte bělicí přípravky určené pro údržbu domácnosti.
2. Těhotné ženy by neměly bělit.
3. Máte-li jakékoli dotazy ohledně správného použití produktů včetně toho, jak dlouho bude trvat vybělení vašich zubů, prosíme, konzultujte je co nejdříve s vaším ošetřujícím stomatologem.
4. Při bělení nekuřte nebo nejezte.
5. Bílé body na sklovině (nebo pokud se objeví v průběhu bělení) mohou při pokračujícím bělicím procesu splynout s barvou vyběleného zubu
6. Zuby jsou přirozeně tmavší okolo linie dásní. Tyto oblasti mohou vyžadovat k vybělení více času než zbytek povrchu zubu a obvykle zůstávají o něco tmavší.

Všeobecná upozornění:

1. Malé procento pacientů má zkušenost s citlivostí během bělení. Pokud se vám to přihodí, sundejte nosič a kontaktujte svého zubního lékaře.
2. Potraviny a džusy s vysokým obsahem kyseliny citronové mohou způsobit citlivost zubů.
3. Někteří pacienti zaznamenají dočasný diskomfort na dásních, rtech, v hrdle nebo na jazyku. Pokud některý z těchto symptomů přetrvává více jak 2 dny nebo se zhoršuje, volejte svému zubnímu lékaři. Tyto vedlejší účinky obvykle pominou během 1-3 dnů po přerušení ošetření.
4. Káva, tabák a další produkty mohou časem opětovně zapříčinit vznik skvrn na zubech. Pokud se to přihodí, zuby mohou být přeběleny několika aplikacemi Opalescence Oh!.
5. K udržení zdravého bílého vzhledu zubů jsou důležité pravidelné stomatologické kontroly a profesionální čištění zubů před i po bělení
6. Některé staré amalgamové nebo "stříbrné" výplně mohou zanechat tmavě fialovou barvu v bělicím nosiči; to je normální.
7. Korunky, můstky, částečné protézy, fazety a kompozitní výplně se nevybělí.
8. Skladujte bělicí přípravky mimo sluneční světlo a teplo. Doporučujeme skladování v chladničce. Nezmrazujte.
9. Po kompletním ukončení procesu bělení zlikvidujte nespotřebovaný bělicí gel.
10. Uchovávejte Opalescence Oh! mimo dosah dětí.
11. Nepolykejte gel nebo oplachovaný gel. Výrobek obsahuje peroxid vodíku a fluorid; Polknutí velkého množství může být škodlivé.

*Hu-Fa Dental, a.s. - výhradní dovozce produktů Ultradent v CZ i SK:
Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 20*

e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz