

Začněte bělit svůj úsměv s Opalescence PF již dnes!

Návod pro pacienty, pro použití s Opalescence PF 10, 15, 20% a 35%

Výrobce: Ultradent Products, Inc.

Postup:

1. Před aplikací bělicího gelu Opalescence si důkladně vyčistěte zuby, nejlépe s použitím bělicí zubní pasty Opalescence.
2. Řiďte se radami vašeho ošetřujícího lékaře, jak aplikovat gel do individuálního nosiče.
3. Odejměte kryt ze špičky stříkačky. Vytlačujte malé množství obsahu stříkačky (obvyklé množství 1/2 - 1/3 obsahu stříkačky) stejným tlakem a táhlým pohybem, směrem k vnější straně, do nejhlubšího místa v nosiči.
4. Lehce přiadaptujte nosič na zuby. Nepoužívejte tlak. Užitím většího tlaku vytlačíte příliš mnoho gelu ven z nosiče.
5. Kartáčkem nebo čistým prstem jemně odstraňte přebytečný gel, který může přetéci přes okraj. Opatrně vypláchněte ústa, nepolykejte.
6. Ideální doporučená délka aplikace dle koncentrace:
 - Opalescence 10% po dobu 8-10hod nejlépe během noci
 - Opalescence 15% po dobu 4-6hod
 - Opalescence 20% po dobu 2-4hod
 - Opalescence 35% po dobu 30min.
7. Po doporučené době nosič vyjměte. Jemně očistěte nosič od gelu oplachem nebo za použití kartáčku. Nosič uchovávejte v ochranné krabičce na nosič (součást balení).
8. Vyčistěte zuby běžným způsobem, nejlépe s použitím kartáčku a bělicí zubní pasty Opalescence. Dvakrát vypláchněte ústa, nepolykejte zůstatkový bělicí gel.
9. Před jídlem nebo pitím nosič vždy vyjměte.

Upozornění:

1. Nepoužívejte bělicí produkty Opalescence během těhotenství.
2. Skladujte mimo dosah dětí
3. S nasazeným nosičem nejezte. Bělicí gel obsahuje peroxidy a fluoridy, proto se vyvarujte jeho zbytečnému polykání. Zpolykání většího množství bělicího gelu může být zdraví škodlivé.
4. Neužívejte tabákové produkty, NEKUŘTE a NEJZTE s nasazeným nosičem.
5. Stříkačky s bělicím gelem nevystavujte tepelnému nebo slunečnímu záření.
6. Bělicí gel doporučujeme uchovávat v chladničce. Stříkačky nezmrazujte.
7. Před použitím vyjměte gel z chladničky a nechejte zahřát na pokojovou teplotu po dobu cca 30min.

Poznámka:

1. Zuby jsou v místě u dásní přírodně tmavší. Pro zesvětlení, mohou tato místa vyžadovat více času než zbytek zubního povrchu a obvykle zůstanou lehce tmavší.
2. Světlé skvrny, které se objeví na sklovině v průběhu bělení postupně splynou během následného bělicího procesu.
3. Malé procento pacientů se během bělení setká s citlivostí . Pokud se objeví, kontaktujte svého zubního lékaře. Může vám doporučit bělení každou druhou nebo třetí noc, nebo aplikaci gelu UltraEZ na snížení citlivosti. Také můžete použít bělicí gel Opalescence na zkrácenou dobu během dne na 1-3 hodiny. Potraviny a nápoje s vysokým obsahem kyseliny citronové mohou způsobit zvýšenou citlivost.
4. Někteří pacienti si všimli dočasné mírné strnulosti dásní, rtů nebo jazyka. Pokud některý z těchto symptomů přetrvává více než 2 dny, nebo se výrazně zhoršují, kontaktujte svého zubního lékaře. Tyto vedlejší účinky vymizí do 1-3 dnů po ukončení procedury.

5. Káva, tabák a další produkty mohou opět časem zabarvit vaše zuby. Pokud toto nastane, vaše zuby mohou být opět doběleny po několika nočních aplikacích Opalescence. Doporučujeme používat bělicí zubní pastu Opalescence, která vám bude vybělený odstín dlouhodobě udržovat.
6. Pro dosažení zdravého úsměvu, jsou pravidelné zubní prohlídky a čištění důležité před, i po bělení.
7. Pokud máte jakékoliv dotazy vztahující se k tomuto ošetření, prosím obraťte se na svého zubního lékaře.
8. Některé starší amalgámové nebo stříbrné výplně mohou v nosiči ponechat tmavě fialové zbarvení, což je normální.
9. Zubní náhrady, korunky, můstky, kompozitní a keramické fasety a výplně se nevybělí.
10. Nepoužitý gel po ukončení bělicí procedury znehodnoťte.