

PermaFlo® Purple

Kompozit jako indikátor anatomie

Popis a indikace:

Permaflo Purple je světlem tuhnoucí, rentgenkontrastní flow kompozit na bázi metakrylátu. PermaFlo obsahuje plnivo s průměrnou velikostí částic 1 µm s úzkým rozpětím horní meze jejich velikostní distribuce. Je tixotropní, plněný z 68%.

Indikace:

Jako provizorní uzávěr po endodontickém ošetření. Nachová barva slouží lékaři jako indikátor před zhotovením kořenové nástavby a/nebo definitivní výplně. Dno dřeňové dutiny nebo vchody do kanálků se nacházejí hned pod PermaFlo Purple. Vchody do kanálků se nikdy nenacházejí laterálně od tohoto nachového kompozitu.

Použití:

- A. Snadné rozpoznání místa vchodu do kořenového kanálku.
- B. Snadná orientace ve vztahu k blízkosti dna dřeňové dutiny.

Postup:

- A. Musí být dokončeno zaplnění kořenového kanálku.
- B. Naleptejte 15 vteřin.
- C. Opláchněte a osušte, nepřesušte.
- D. Naneste dentinové adhezívum (doporučujeme PQ1 nebo PQ SE). Ofoukněte vzduchem, osviťte polymerační lampou 20 vteřin.
- E. Na dno dřeňové dutiny naneste PermaFlo Purple v síle 1-2 mm. Důležitá poznámka: Pokud materiál nanesete ihned po plnění kanálku s použitím sealeru s obsahem zinkoxideugenolu, naruší se polymerizace pryskyřice. Doporučujeme hydrofilní pryskyřičný sealer EndoREZ™.
- F. Osviťte 20 vteřin.
- G. Uzavřete provizorní výplní (nebo zub dostavte).

Upozornění:

1. Nikdy nestlačujte písty násilím. Pokud cítíte ve stříkačce odpor proti toku materiálu, vyměňte kanylu a znovu vyzkoušejte. Pro každý materiál používejte pouze pro něj doporučené kanylky.
2. Mimo dobu práce s PermaFlo Purple jej skladujte v chladničce.
3. Po každém pacientovi stříkačku(y) vyčistěte a vydezinfikujte. Stříkačky pro intraorální použití a kanylky jsou na jedno použití.
4. Jakákoliv pryskyřice může senzibilizovat kůži nebo u již senzibilizovaného jedince způsobovat alergickou reakci. Oblast kůže zasaženou pryskyřicí proto důkladně opláchněte. Pokud se objeví dermatitis, vyrážka nebo jakákoliv jiná alergická reakce, musí se pacient odeslat k praktickému lékaři.

Legenda k symbolům:

Použit do data:

Nepoužívat znovu:

Objednáací číslo:

Viz návod k použití:

Číslo šarže:

Dráždivá látka

Uchovejte mimo dosah dětí

Doporučená teplota při skladování: 2 – 8 °C

Trvanlivost: 24 měsíců. Skladujte při pokojové teplotě.

Stříkačky Ultradent mají po stranách vytištěno datum expirace, které se skládá z jednoho písmena a tří číslic. Písmeno označuje sérii pro účely výroby a tři číslice jsou vlastní datum expirace. První dvě číslice značí měsíc a třetí číslice je poslední číslicí letopočtu.

Sekvence nečíslovaných obrázků

- 1. Zaplněné kanálky*
- 2. Naleptejte 15 vteřin*
- 3. Naneste adhezivum (zde PQ1). Osviňte polymerační lampou*
- 4. PermaFlo v jednom nebo dvou malých inkrementech naneste na dno dřeňové dutiny a do vchodů do kořenových kanálků. Každý inkrement polymerizujte lampou 20 vteřin. Zhotovte provizorní výplň.*

Distribuce v ČR: **Hu-Fa Dental a.s.**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226-9, fax: 577 926 205